

CrioteX⁴

criolipolisis multiple

Manual de Usuario



LC4



TEXEL
EQUIPOS ELECTROMEDICOS

Tabla de contenido

Finalidad de Uso	3
Zonas de Trabajo	3
Contraindicaciones	3
Medidas de Seguridad	4
Generalidades y Consejos	4
Especificaciones Generales.....	5
Partes del equipo.....	7
Recomendaciones de uso	8
Modo de uso.....	8
Recomendación para el traslado del equipo.....	8
Aplicación.....	9
Tiempo de tratamiento	10
Funcionamiento del equipo.....	10
Colocación de ventosas	10
Configuración de un programa.....	11
Presentación	11
Entrando en regimen.....	11
Cabezal no disponible	11
Tiempo de sesión.....	12
Temperatura y succión	12
Equipo trabajando.....	12
Fin de sesion	13
Configuracion del cabezal.....	14
Presentacion	14
Entrando en regimen.....	14
Temperatura y succión	15
Fin de sesion	15
Cambio de configuracion de cabezales	16
Limpieza y desinfección	17

Mantenimiento17

 Trampa de agua.....17

 Recarga de liquido refrigerante.....17

 Limpieza de tubería.....18

Servicio técnico19

Garantía.....20

Advertencias20

Simbología22

Finalidad de Uso

El Criotex es un equipo de criolipólisis que cuenta con cabezales de crio tecnología que logra llevar la temperatura del tejido hasta -10°C lo que permite la cristalización del adipocito con la coincidente eliminación. Es un tratamiento que no genera flacidez gracias al diseño anatómico de sus cabezales y ventosas de silicona que permite un perfecto y homogéneo contacto con la piel utilizándolo para cualquier tipo de contorno.

Uno de sus beneficios es que permite eliminar el tejido adiposo localizado de difícil remoción destruyendo las células grasas exponiéndolas a bajas temperaturas mediante un proceso de succión utilizado sobre la zona afectada. Así, la aplicación del frío produce un efecto inhibitorio en los receptores que captan los lípidos que luego van a ingresar a los adipocitos generando un proceso de apoptosis. De esta manera, se impide que los adipocitos vuelvan a captar los lípidos.

Se recomienda utilizar el plicómetro para poder ver la reducción del tejido adiposo antes y después del tratamiento ya que permite evaluar, si los adipocitos que fueron afectados por el frío, se sigan eliminando. Esto puede tardar hasta 90 días posteriores a la sesión.

El tiempo de sesión varía de acuerdo a la zona a trabajar y de la cantidad de cabezales que contenga el equipo.

Zonas de Trabajo

- Brazos
- Abdomen
- Flancos
- Muslos
- Zonas subescapulares
- Zonas trocaterianas

Contraindicaciones

- Embarazo
- Cáncer
- Epilepsia
- Trayectos varicosos
- Marcapasos



Escanea el Código QR con tu dispositivo móvil que te llevará directamente a nuestra página web donde encontrarás toda la información referida al equipo y sus tratamientos.

Medidas de Seguridad

Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del usuario, puede ayudar a obtener muchos años de uso y operación segura.

- **Leer las instrucciones.** Todas las instrucciones de operación y seguridad deben ser leídas antes de operar este equipo
- **Accesorios:** Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo
- **Limpieza:** Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o líquidos
- **Equipo Clase I:** Los equipos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y la ficha provista
- Para su seguridad la instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no ser así, realice la adecuación con personal especializado
- La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe cumplir con las normativas vigentes locales

Su equipo ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de incendio.

Generalidades y Consejos

- El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, cocinas u otros productos que produzcan calor
- Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento y coloración amarillenta sobre el gabinete
- Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes
- El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la ficha del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo
- NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas
- Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil
- Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los cables de conexión, gabinete y accesorios en general
- Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor rojo del equipo para su correcto apagado

Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha de alimentación

Especificaciones Generales

Especificaciones Técnicas

Cantidad de cabezales	4
Programación del cabezal	Independiente
Regulación de temperatura	-10° a 5°C
Intensidad de vacío	Regulable en 10 pasos
Tiempo de sesión	1 a 90 minutos
Sensor de temperatura	Si (cabezal y equipo)
Nivel de vacío de succión	Medio - Alto
Dimensiones	110 x 61 x 52 cm
Peso	99 kg
Pantalla del equipo	LCD 5,7" táctil
Pantalla del cabezal	LCD 2,4" táctil

Especificaciones Eléctricas

Alimentación	220 VCA 50/60 Hz. (120 V 50/60Hz)
Consumo máximo	1659 W
Consumo aproximado en reposo	56 W
Consumo mínimo	300 W
Fusible	M 10 A, 250 V
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0

Condiciones Ambientales De Almacenamiento Y Transporte

Temperatura	Entre 5 °C y 50 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Condiciones Ambientales De Uso

Temperatura	Entre 5 °C y 25 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Incluye:

- 4 cabezales
- 4 soportes de cabezal, tornillos y herramienta de fijación
- 4 ventosas pequeñas

- 2 ventosas medianas
- 2 ventosas grandes
- 4 bandas elásticas con abrojo
- Plícometro
- 50 sobres con paños anticongelantes dobles
- Mangueras de carga y purgado con embudo
- Líquido refrigerante
- Cable de alimentación
- Manual del usuario

Partes aplicables:



- 4 cabezales
- 4 soportes de cabezales, tornillos y herramienta de fijación
- 4 ventosas pequeñas
- 2 ventosas medianas
- 2 ventosas grandes
- 4 bandas elásticas con abrojo
- Plícometro
- 50 sobres con paños anticongelantes dobles
- Mangueras de carga y purgado con embudo
- Líquido refrigerante
- Cable de alimentación

El periodo útil del producto es de 5 años



Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes nacionales en vigor en el país de instalación

Partes del equipo

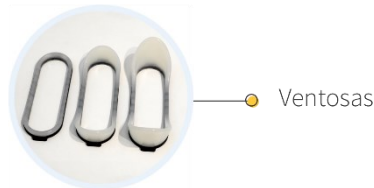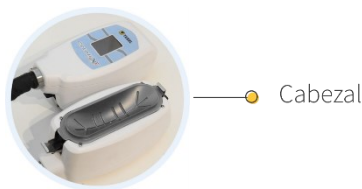

Recomendaciones de uso

Modo de uso

No utilice geles adicionales durante la aplicación del cabezal. Los paños anticongelantes provistos ya contienen la cantidad de gel necesaria para el tratamiento. El uso de geles extra puede provocar la obstrucción de las mangueras del cabezal, lo que podría dañar el equipo e inutilizar su funcionamiento.

- Después de trasladar el equipo, espere al menos 2 horas antes de encenderlo para evitar posibles fallos en su funcionamiento.
- La temperatura recomendada de trabajo es entre 5 °C y -5 °C, de acuerdo con lo que indique el profesional tratante.
- Revise el nivel de agua del depósito regularmente. Si el nivel es bajo, el rendimiento del equipo puede verse afectado. (Ver sección 9.0 - Mantenimiento)
- Verifique también el nivel de agua del recipiente trampa de agua antes de iniciar cada sesión. En caso de trasladar el equipo, los recipientes deben estar vacíos. (Ver sección 9.0 - Mantenimiento)
- Si va a utilizar el equipo en un ambiente con temperatura mayor a 25 °C, se recomienda encenderlo 15 minutos antes de la sesión para asegurar un rendimiento óptimo.
- Para evitar la caída del cabezal, utilice una banda de sujeción. No deje la manguera colgando ni permita que ejerza tracción sobre el cabezal.
- Al finalizar la jornada, deje los cabezales colgados y el equipo encendido con succión durante 10 minutos para prevenir obstrucciones internas.
- Cuando el cabezal esté fuera de uso o en transporte, evite exponerlo a ambientes húmedos.

Recomendación para el traslado del equipo

Antes de trasladar el equipo, retire los vasos ubicados en la parte posterior. En caso de que estos vasos contengan líquido, deberá vaciarlos por completo antes del traslado.

El ingreso accidental de líquido al interior del equipo puede ocasionar daños graves en su funcionamiento y anular la garantía.

Aplicación



No usar con personas que puedan tener marcapasos o algún dispositivo electrónico relacionado con el soporte de vida

Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual

- La persona en tratamiento debe estar siempre a la vista del operador
- Antes de comenzar cerciórese de que el cabezal no se encuentre en contacto con la piel
- Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales
- No mojar la zona tratada con agua caliente
- Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños

Temporalmente puede aparecer:

- Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar unos minutos
- Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual que el enrojecimiento, un corto período de tiempo
- Hematomas causados por la succión



¡ATENCIÓN! Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

La banda elástica proporcionada con el equipo puede utilizarse para asegurar el cabezal, lo que ayuda al profesional a mantener el cabezal inmóvil sobre el área a tratar. Se ajusta mediante cierres de velcro. Es importante no ajustar demasiado, solo aplicar la presión necesaria para evitar que el cabezal se mueva de la posición establecida por el profesional.



Es fundamental utilizar el paño entre el cabezal y la piel a tratar, ya que está especialmente diseñado para proporcionar un efecto anticongelante.

Esto resulta imprescindible para proteger la piel y evitar posibles efectos secundarios, además de favorecer la correcta succión del tejido adiposo dentro de la ventosa.

Tiempo de tratamiento

Tanto la cantidad como el tiempo de cada sesión, dependerá de lo indicado por el profesional calificado.

Todo consejo aquí presentado es de carácter general, en cualquier caso, será el profesional calificado quien deberá adecuar el uso del equipo a cada persona y a su propia evolución

Funcionamiento del equipo

Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al comienzo de este manual

- Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente con red de 220 V y al equipo
- Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto no permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de este

Los equipos de la Clase I poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **No las elimine** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. No obstruir las ventilaciones.

Colocación de ventosas



La imagen muestra un cabezal de tratamiento estético que incorpora un sistema de ventosas intercambiables, diseñado para adaptarse a diferentes contornos corporales.

El cabezal cuenta con un **sistema de cierre mecánico** que asegura que la ventosa intercambiable quede firmemente colocada. Este sistema utiliza un mecanismo de traba tipo clip, el cual ajusta las lengüetas laterales de la ventosa, manteniéndola en la posición correcta y evitando movimientos indeseados durante su uso.

Para retirar o reemplazar la ventosa del cabezal, presione simultáneamente las trabas ubicadas en ambos extremos. Esto liberará la ventosa y permitirá retirarla de forma segura.

Nota importante: Una colocación incorrecta puede afectar la eficacia del tratamiento o dañar el cabezal. Siempre asegurarse de que la ventosa esté bien encastrada antes de iniciar la sesión.

Configuración de un programa

Presentación



Al encender el equipo, se verá la pantalla de presentación. Para comenzar a configurarlo, simplemente presione la pantalla.

Entrando en regimen



Al encender el equipo, el sistema realiza una lectura automática de la temperatura interna mediante un sensor de temperatura. Este proceso implica que el equipo no iniciará su funcionamiento hasta alcanzar una temperatura de 15 °C. Si al encender el equipo la temperatura no llega a este valor, deberá esperar a que alcance los 15 °C para poder comenzar a trabajar.

Cabezal no disponible



Esta pantalla indica que los cabezales no están conectados o no están correctamente conectados al equipo o que presenta alguna falla que impide su reconocimiento.

Verifique que el conector esté bien ajustado y que no haya daños visibles en el cable o el cabezal.

En caso de persistir el mensaje, contacte con servicio técnico.

Tiempo de sesión



Utilice las **flechas** para ajustar el tiempo deseado de la sesión. Una vez configurado, presione el botón **SIGUIENTE** para continuar a la siguiente pantalla.

Temperatura y succión



En esta pantalla puede configurar el tiempo de sesión y el nivel de succión, utilizando las flechas de selección según las necesidades del tratamiento. Por defecto, la temperatura se encuentra en 0 °C y el nivel de succión en su valor mínimo.

Una vez que haya ajustado todos los parámetros deseados, presione el botón **INICIAR** para comenzar la sesión.

Antes de iniciar, asegúrese de que: el usuario esté correctamente posicionado, el paño anticongelante esté colocado entre la piel y el cabezal y el cabezal esté bien ajustado.

Si necesita modificar el tiempo de tratamiento, puede hacerlo presionando el botón **ATRÁS**.

Equipo trabajando



En esta pantalla los valores de temperatura y succión pueden ajustarse durante la sesión sin necesidad de detenerla o pausarla.

Fin de sesión



Al concluir la sesión, se emitirá una señal sonora para indicar que el tiempo ha terminado. Si bien el equipo detiene el enfriamiento, pero mantiene la succión activa para asegurar que el cabezal no se desprenda de forma brusca.

Cuando el operador esté listo, deberá presionar el botón DETENER SUCCIÓN para liberar el cabezal de manera

segura y retirarlo sin inconvenientes.

Configuración del cabezal

Presentación



Al encender el equipo, se mostrará en la pantalla del cabezal una pantalla de presentación. Para iniciar la configuración, toque la pantalla.

La pantalla del cabezal funciona como un espejo de la pantalla principal del equipo. Esto significa que muestra exactamente la misma información y permite realizar las mismas acciones de control que la pantalla central.

De esta manera, el operador puede manipular y ajustar los parámetros del tratamiento tanto desde el equipo principal como directamente desde el cabezal, brindando mayor comodidad y flexibilidad durante la sesión.

Entrando en régimen



Al encender el equipo, el sistema realiza una lectura automática de la temperatura interna mediante un sensor de temperatura. Este proceso implica que el equipo no iniciará su funcionamiento hasta alcanzar una temperatura de 15 °C. Si al encender el equipo la temperatura no llega a este valor, deberá esperar a que alcance los 15 °C para poder comenzar a trabajar.

Cabezal no disponible



Esta pantalla indica que los cabezales no están conectados o no están correctamente conectados al equipo o que presenta alguna falla que impide su reconocimiento.

Verifique que el conector esté bien ajustado y que no haya daños visibles en el cable o el cabezal.

En caso de persistir el mensaje, contacte con servicio técnico.

Tiempo de sesion



Utilice las **flechas** para ajustar el tiempo deseado de la sesión. Una vez configurado, presione el botón **SIGUIENTE** para continuar a la siguiente pantalla.

Temperatura y succión



En esta pantalla los valores de temperatura y succión pueden ajustarse durante la sesión sin necesidad de detenerla o pausarla.

El ícono de candado rojo ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla indica que la pantalla se encuentra bloqueada, lo que impide modificar cualquier parámetro accidentalmente mientras el cabezal está en uso.

Si desea realizar ajustes, mantenga presionado el botón del candado rojo hasta que se transforme en un candado verde. En ese momento, la pantalla quedará activa y permitirá modificar los valores configurados.

Fin de sesion



Al concluir la sesión, se emitirá una señal sonora para indicar que el tiempo ha terminado. Si bien el equipo detiene el enfriamiento, pero mantiene la succión activa para asegurar que el cabezal no se desprenda de forma brusca.

Cuando el operador esté listo, deberá presionar el botón DETENER SUCCIÓN para liberar el cabezal de manera segura y retirarlo sin inconvenientes

Cambio de configuración de cabezales

En algunos casos, puede suceder que el **cabezal 1 esté conectado en la entrada del cabezal 2**, o viceversa. Para que el equipo reconozca correctamente el número de cabezal que se desea configurar, se debe seguir estas indicaciones:

- En la pantalla del cabezal, acceda a la pantalla de tiempo
- Ingrese manualmente la cantidad de minutos correspondiente al cabezal que quiera configurar
- Luego, mantenga presionado durante unos segundos el título que aparece en pantalla como "CABEZAL 1"
- Tras unos segundos, el texto cambiará y mostrará el número de cabezal seleccionado (por ejemplo, "CABEZAL 2")
- El cabezal emitirá una señal audible que indica que el cambio de configuración fue realizado con éxito.

Limpieza y desinfección

- La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un paño seco
- La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 °C
- No sumergir los cabezales ya que podría ingresar líquido en su interior
- El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere, se puede efectuar un control periódico en fábrica
- No se puede esterilizar en autoclaves de vapor

Mantenimiento

Trampa de agua



15 °C

para



poder

comenzar

a

trabajar.

Al encender el equipo, el sistema realiza una lectura automática de la temperatura interna mediante un sensor de temperatura.

Este proceso implica que el equipo no iniciará su funcionamiento hasta alcanzar una temperatura de 15 °C. Si al encender el equipo la temperatura no llega a este valor, deberá esperar a que alcance los

- Si es necesario, desenroscar cuidadosamente el recipiente, limpiarlo con agua y secarlo.
- Volver a colocarlo firmemente, asegurándose de que quede correctamente enroscado. Un mal ajuste puede generar pérdida de succión.

Importante: Es fundamental mantener la trampa de agua limpia, ya que, si se llena o se descuida su limpieza, los líquidos podrían ingresar al interior del equipo y dañar bombas o sensores del sistema de succión. En el interior del recipiente se encuentra un sello hermético (O-ring) que evita la pérdida de aire. No remover ni dañar este sello.

Recarga de líquido refrigerante



Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y evitar sobrecalentamientos, es fundamental mantener el nivel de líquido refrigerante en condiciones óptimas. Se recomienda revisar el nivel periódicamente y realizar una recarga cuando esté por debajo del **50%**

Preparación:

- Asegúrese de que el equipo esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
- Prepare un recipiente limpio para recolectar el líquido sobrante y evitar derrames.



Conexión de mangueras:

- Conecte la manguera del embudo en el conector inferior del equipo (entrada de agua).
- Conecte la manguera de descarga en el conector superior (salida de purga).
- Coloque el recipiente debajo de la manguera inferior para contener el líquido que pueda drenar.

Recarga:

- Vierta el líquido refrigerante provisto por el fabricante en el embudo.
- En caso de no contar con el líquido original, utilice agua destilada.
- Cargue hasta alcanzar el nivel óptimo, idealmente no menos del 50%.

Finalización:

- Retire cuidadosamente las mangueras.
- Limpie cualquier posible residuo o derrame.
- Vuelva a conectar y encender el equipo para verificar su correcto funcionamiento.

Importante: Nunca utilice agua de red ni otros líquidos que no hayan sido aprobados para este uso, ya que podrían dañar el sistema de refrigeración.

Limpieza de tubería

Para asegurar un funcionamiento óptimo del equipo y mantener una correcta capacidad de succión, se recomienda realizar una limpieza preventiva de las tuberías. Verifique el recipiente (trampa de agua):

- Controle que el O-ring esté correctamente colocado.

- Asegúrese de que el recipiente esté bien ajustado y cerrado.

Revise el contenido del recipiente:

- Confirme que los recipientes estén vacíos, ya que el líquido acumulado puede afectar el rendimiento.
- Realice una prueba de limpieza del sistema:
- Inicie una sesión con la temperatura configurada en 0°C.
- Ajuste el nivel de vacío al máximo.
- Coloque el cabezal en posición boca arriba.
- Vierta una pequeña cantidad de agua dentro del cabezal.

Interprete el resultado:

- Si el agua no ingresa, significa que hay una obstrucción completa en la tubería de succión.
- Si el agua ingresa correctamente, la tubería se limpiará durante el proceso, lo cual podrá observarse en las trampas de agua.

Importante: Mantener el sistema limpio y los recipientes vacíos prolongará la vida útil del equipo y optimizará cada tratamiento.

Servicio técnico

Si el equipo muestra esta pantalla, por favor desconéctelo y póngase en contacto con el Servicio Técnico de TEXEL SRL para recibir asistencia técnica.

Si se ignoran estas advertencias, se podría poner en riesgo de forma irreversible la seguridad general del sistema, lo cual puede resultar peligroso para el operador, las que reciben el tratamiento y el entorno.

- El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL SRL o un servicio autorizado expresamente para tal fin
- **NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.** No intente dar servicio a este equipo usted mismo, abriendo o retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos
- Daños que requieren servicio técnico: Desenchufe el equipo del tomacorriente y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
 - Si el cable de alimentación o enchufe están dañados
 - Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua
 - Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de operación indicadas en el manual

- Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento

Garantía

El equipo fabricado por TEXEL SRL, tiene cobertura de garantía por el término de **2 años**.

- La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL SRL, a un distribuidor o representante autorizado
- Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica
- Durante el periodo de la garantía, es importante guardar el embalaje original del equipo. Cualquier traslado debe realizarse utilizando el embalaje original, junto con su correspondiente protección interna, para garantizar su integridad durante el transporte
- La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas. De esta manera, los gastos del transporte corren por cuenta del fabricante
- La validez de la garantía quedará anulada si el equipo ha sido objeto de modificaciones, golpes, uso inadecuado, esfuerzos inapropiados, reparaciones realizadas por personal no autorizado o si ha sido conectado a una instalación eléctrica defectuosa. Esto incluye variaciones en la tensión de la red que excedan los límites de tolerancia, así como voltajes incorrectos, independientemente de su origen. Por consiguiente, todos los gastos relacionados con el envío del equipo al servicio técnico oficial de TEXEL SRL correrán a cargo del comprador

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, distribuidor o servicio técnico autorizado.

Advertencias

Disposición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera segura y ecológica



- A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego
- Haga controlar el equipo 1 vez al año
- Incompatibilidades con otros equipos: la operación del equipo en cercanías a un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento, ocasionando daños en el equipo



- Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor

- Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales electromagnéticos u otras interferencias entre equipos

Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento técnico de fábrica.

Simbología

	Encendido		Frágil
	Apagado		Posición de transporte y almacenamiento
	Tierra de protección: conexión del equipo al conductor de protección a tierra		Proteger de la lluvia
	Equipo de Clase I con protección contra descargas eléctricas y parte aplicada Tipo B (IEC 60601-1)		Fusible
	Este símbolo recuerda que es obligatorio leer cuidadosamente toda la documentación y los manuales suministrados con el producto médico antes de realizar cualquier operación		Fabricante
	Advertencia, consulte los documentos adjuntos		Número [n] máximo de cajas que pueden apilarse de manera segura.
	Respete las normas de aplicación de su municipalidad para el desecho del equipo médico		Condiciones de temperatura de transporte y almacenamiento
	Corriente alterna		Condiciones de humedad de transporte y almacenamiento
	Fecha de fabricación		Condiciones de presión de transporte y almacenamiento
	Advertencia: Tensión peligrosa. Riesgo de choque eléctrico		No empujar
	Número de Serie		



www.texel.com.ar



 Pichincha 54 Bis,
2000 Rosario, Argentina.

 info@texel.com.ar

 +54 9 341 3022075

 +54 0341 4397575