

Cavitex

Manual de Usuario



UC



TEXEL
EQUIPOS ELECTROMEDICOS

Tabla de contenido

Finalidad de Uso	2
Zonas de Trabajo	2
Contraindicaciones.....	2
Medidas de Seguridad	4
Generalidades y Consejos.....	4
Especificaciones Generales	5
Partes del equipo	7
Recomendaciones de uso.....	8
Modo de uso.....	8
Aplicación.....	8
Tiempo de tratamiento.....	8
Funcionamiento del equipo	8
Configuración de un programa	9
Presentación	9
Selección de tiempo	9
Selección de modo	9
Modo de trabajo Continuo.....	10
Inicio de sesión	10
Modo continuo trabajando.....	10
Selección de frecuencia.....	11
Equipo en pausa	11
Equipo en pausa 2.....	11
Fin de sesión	12
Limpieza y desinfección	13
Servicio técnico.....	13
Garantía	14
Advertencias	14
Simbología	16

Finalidad de Uso

El Cavitetex es un equipo de ondas ultrasónicas moduladas (38 kHz) a baja frecuencia y a alta potencia lo que permite llegar a mayor profundidad de tejido adiposo e impactar con mayor intensidad generando, controladamente, microburbujas de vacío que producen la cavitación en el interior del fluido. La ultracavitación tiene como objetivo la eliminación de la adiposidad localizada de manera no invasiva estimulando, además, la circulación sanguínea y el colágeno mejorando el aspecto externo de la celulitis. Las ondas ultrasónicas ingresan al organismo y alcanzan el tejido celular subcutáneo generando microburbujas que aumentan en cantidad produciendo el colapso y la implosión de las células adiposas. Esto se produce debido a la presión ejercida sobre las cavidades expandidas. A este proceso se lo llama cavitación. El efecto fisiológico resultante es la fermentación adipositaria con la consecuente difusión de la matriz lipídica de los adipocitos. Esto trae a consecuencia la emulsión de los adipocitos sin alterar los tejidos periféricos. Este contenido emulsionado es recogido por el sistema linfático transportándolo al hígado donde se metaboliza para continuar con los procesos orgánicos normales. Los resultados son visibles desde la primera aplicación. La cantidad, tiempo y periodicidad de las sesiones queda a criterio de cada profesional.

Zonas de Trabajo

- Abdomen
- Glúteos
- Zonas trocaterianas
- Brazos

Contraindicaciones

- Marcapasos
- Embarazo
- Lactancia
- Epilepsia
- Cáncer
- Trayectos Varicosos
- Cualquier alteración de la piel
- Personas con prótesis acústicas



Escanea el Código QR con tu dispositivo móvil que te llevará directamente a nuestra página web donde encontrarás toda la información referida al equipo y sus tratamientos.

Medidas de Seguridad

Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del usuario, puede ayudar a obtener muchos años de uso y operación segura.

- **Leer las instrucciones.** Todas las instrucciones de operación y seguridad deben ser leídas antes de operar este equipo
- **Accesorios:** Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo
- **Limpieza:** Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o líquidos
- **Equipo Clase I:** Los equipos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y la ficha provista
- Para su seguridad la instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no ser así, realice la adecuación con personal especializado
- La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe cumplir con las normativas vigentes locales

Su equipo ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de incendio.

Generalidades y Consejos

- El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, cocinas u otros productos que produzcan calor
- Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento y coloración amarillenta sobre el gabinete
- Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes
- El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la ficha del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo
- NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas
- Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil
- Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los cables de conexión, gabinete y accesorios en general
- Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor rojo del equipo para su correcto apagado

Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha de alimentación

Especificaciones Generales

Especificaciones Técnicas

Frecuencia de emisión	38 kHz
Potencia de emisión máxima	70 VA
Control de intensidad	Si
Tiempo de sesión	De 5 a 60 minutos
Modo de trabajo	Continuo - Intermitente
Tipo de frecuencia	Fija y Modulada
Dimensiones	45x20x34 cm
Peso	16 kg
Pantalla	LCD 5,7" táctil

Especificaciones Eléctricas

Alimentación	220 VCA @ 50/60 Hz
Consumo máximo	105,82 W
Consumo aproximado en reposo	25,74 W
Consumo mínimo	82,72 W
Fusible	3 A – 250 V – Acción rápida
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0

Condiciones Ambientales De Almacenamiento Y Transporte

Temperatura	Entre 5 °C y 50 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Condiciones Ambientales De Uso

Temperatura	Entre 5 °C y 25 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Incluye:

- 1 cabezal
- 1 bolso grande
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

Partes aplicables:

- 1 cabezal

El periodo útil del equipo es de 5 años

Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes nacionales en vigor en el país de instalación

Partes del equipo



Recomendaciones de uso

Modo de uso

- Es recomendable usar aceite de masaje para lograr un deslizamiento óptimo del cabezal sobre la zona a tratar

Aplicación

Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual

- La persona en tratamiento debe estar siempre a la vista del operador
- Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales
- No mojar la zona tratada con agua caliente
- Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños

Temporalmente puede aparecer:

- Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar desde unos minutos a horas
- Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual que el enrojecimiento, un corto período de tiempo



¡ATENCIÓN! Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

Tiempo de tratamiento

Tanto la cantidad como el tiempo de cada sesión, dependerá de lo indicado por el profesional calificado.

Todo consejo aquí presentado es de carácter general, en cualquier caso, será el profesional calificado quien deberá adecuar el uso del equipo a cada persona y a su propia evolución.

Funcionamiento del equipo

Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al comienzo de este manual

- Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente con red de 220 V y al equipo
- Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto no permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de este
- Encender el equipo de la tecla roja que se encuentra en la parte posterior del equipo

Los equipos de la Clase I poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **No las elimine** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. No obstruir las ventilaciones ni golpear el cabezal.


Configuración de un programa

Presentación



Al encender el equipo, se verá la pantalla de presentación. Para comenzar a configurarlo, simplemente presione la pantalla.

Selección de tiempo

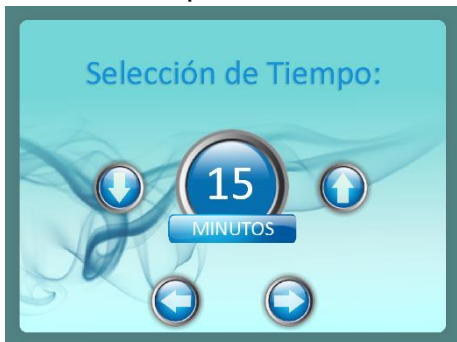

En esta pantalla debe programar la duración de la sesión de tratamiento. Las flechas ubicadas debajo del tiempo tienen funciones específicas: la flecha hacia la derecha le permite avanzar a la siguiente pantalla, mientras que la flecha hacia la izquierda le permite regresar a la pantalla de inicio.

Selección de modo



Deberá seleccionar el tipo de modo que quiere programar el equipo: **Continuo** o **Pulsante**.

En el caso de querer realizar alguna modificación, debe presionar **Atrás**.

En el caso que sea fija, tendrá dos opciones: **Emisión Fija** o **Emisión Modulada**

En el caso de elegir la emisión pulsante, le dará 5 opciones de programas.

Modo de trabajo Continuo



En esta pantalla se puede seleccionar el modo de trabajo: emisión fija y emisión modulada.

Frecuencia Fija: Este modo mantiene una frecuencia constante durante todo el tratamiento.

Frecuencia Modulada: Este modo alterna entre diferentes frecuencias en un rango preestablecido.

Inicio de sesión



Si el equipo está configurado de forma correcta, presione **Comenzar**. De lo contrario, seleccione **Atrás** para volver a la pantalla anterior.

Modo continuo trabajando



Durante la sesión, puede ajustar la frecuencia sin necesidad de detener el equipo. Para hacerlo, presione el botón **Frecuencia**. Esto le permitirá realizar modificaciones sin perder la configuración de tiempo transcurrido ni la configuración de potencia establecida.

Además, puede modificar la potencia con el equipo trabajando.

El tiempo irá disminuyendo durante el proceso.

Selección de frecuencia



En el modo de emisión modulada puede cambiar el programa de la frecuencia. Los tipos de frecuencia de cada programa son preestablecidos

Equipo en pausa




El equipo dispone de un sistema automático de control de pausa que detecta cuando el cabezal está colocado sobre el vaso contenedor. En ese instante, emite una señal audible para indicar que el cabezal está en el soporte. En ese momento, la sesión se congela automáticamente, deteniendo el tiempo para prevenir el sobrecalentamiento y así prolongar la vida útil del equipo. Si desea reanudar la sesión, simplemente retire el cabezal del vaso contenedor y la sesión programada continuará.

Equipo en pausa 2



Puede pausar el equipo en cualquier momento durante la sesión. Si decide reanudar, presione **Continuar sesión**; de lo contrario, seleccione **Finalizar sesión** para regresar a la pantalla inicial.

Fin de sesión

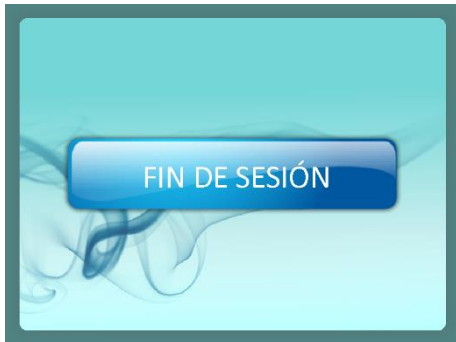

Una vez finalizada la sesión el equipo genera una señal audible. Al presiona el botón de Fin de sesión, volverá a la pantalla inicial.

Limpieza y desinfección

- La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un paño seco.
- La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 °C.
- No sumergir el cabezal ya que podría ingresar líquido en su interior.
- El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere, se puede efectuar un control periódico en fábrica.
- No se puede esterilizar en autoclaves de vapor.

Servicio técnico

Si se ignoran estas advertencias, se podría poner en riesgo de forma irreversible la seguridad general del sistema, lo cual puede resultar peligroso para el operador, las que reciben el tratamiento y el entorno.

- El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL o un servicio autorizado expresamente para tal fin
- **NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.** No intente dar servicio a este equipo usted mismo, abriendo o retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos
- Desenchufe el equipo del tomacorriente y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
 - Si el cable de alimentación o enchufe están dañados
 - Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua
 - Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de operación indicadas en el manual
 - Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado
 - Cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento

Garantía

El equipo fabricado por TEXEL SRL, tiene cobertura de garantía por el término de **2 años**

- La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL SRL, a un distribuidor o representante autorizado
- Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica
- Durante el periodo de la garantía, es importante guardar el embalaje original del equipo. Cualquier traslado debe realizarse utilizando el embalaje original, junto con su correspondiente protección interna, para garantizar su integridad durante el transporte
- La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas. De esta manera, los gastos del transporte corren por cuenta del fabricante
- La validez de la garantía quedará anulada si el equipo ha sido objeto de modificaciones, golpes, uso inadecuado, esfuerzos inapropiados, reparaciones realizadas por personal no autorizado o si ha sido conectado a una instalación eléctrica defectuosa. Esto incluye variaciones en la tensión de la red que excedan los límites de tolerancia, así como voltajes incorrectos, independientemente de su origen. Por consiguiente, todos los gastos relacionados con el envío del equipo al servicio técnico oficial de TEXEL SRL correrán a cargo del comprador

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, distribuidor o servicio técnico autorizado.

Advertencias

Disposición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera segura y ecológica



- A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego
- Haga controlar el equipo 1 vez al año
- Incompatibilidades con otros equipos: la operación del equipo en cercanías a un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento, ocasionando daños en el equipo
- Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor
- Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales electromagnéticos u otras interferencias entre equipos



Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento técnico de fábrica.

Simbología

	Encendido		Frágil
	Apagado		Posición de transporte y almacenamiento
	Tierra de protección: conexión del equipo al conductor de protección a tierra		Proteger de la lluvia
	Equipo de Clase I con protección contra descargas eléctricas y parte aplicada Tipo B (IEC 60601-1)		Fusible
	Este símbolo recuerda que es obligatorio leer cuidadosamente toda la documentación y los manuales suministrados con el producto médico antes de realizar cualquier operación		Fabricante
	Advertencia, consulte los documentos adjuntos		Número [n] máximo de cajas que pueden apilarse de manera segura.
	Respete las normas de aplicación de su municipalidad para el desecho del equipo médico		Condiciones de temperatura de transporte y almacenamiento
	Corriente alterna		Condiciones de humedad de transporte y almacenamiento
	Fecha de fabricación		Condiciones de presión de transporte y almacenamiento
	Advertencia: Tensión peligrosa. Riesgo de choque eléctrico		
	Número de Serie		



www.texel.com.ar



 Pichincha 54 Bis,
2000 Rosario, Argentina.

 info@texel.com.ar

 +54 9 341 3022075

 +54 0341 4397575