

multi tec

Manual de Usuario



VR



TEXEL
EQUIPOS ELECTROMEDICOS

Tabla de Contenido

Finalidad de Uso	3
Medidas de Seguridad	5
Generalidades y Consejos.....	5
Especificaciones Generales	6
Partes del equipo	8
Recomendaciones de uso.....	9
Modo de uso.....	9
Aplicación.....	9
Tiempo de tratamiento.....	9
Funcionamiento del equipo	10
Configuración de un programa	11
Presentación	11
Pantalla de inicio	11
Inicio Rápido	11
Seleccionar Tratamiento	14
Seleccionar Perfil	15
Crear Perfil	15
Buscar Perfil	15
Actividad del Usuario	16
Actividad	16
Configuración.....	16
Configuración WIFI.....	17
Actualización Software	17
Limpiar historial.....	17
Apagado Seguro.....	18
Programas.....	19
Limpieza y desinfección	20
Limpieza de Depósito de Residuos y Depósito de Aire	20
Servicio técnico.....	21

Garantía 22

Advertencias 22

Simbología..... 24

Finalidad de Uso

Multitec es un equipo de vacumradiofrecuencia multipolar multifrecuencial. La excelente combinación de radiofrecuencia, lipólisis láser, vacum y la terapia de Campo Electromagnético Pulsado (PEMF, del inglés Pulsed Electromagnetic Field Therapy) puede trabajar zonas específicas para estimular eficazmente la producción de colágeno, inducir la reducción de la celulitis y eliminar la adiposidad localizada.

Multitec cuenta con 4 cabezales:

- Un cabezal corporal de succión con radiofrecuencia, PEMF y lipólisis láser
- Un cabezal facial de emisión radial bipolar
- Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar
- Un cabezal facial de emisión puntual multipolar

Multitec permite variar la frecuencia para trabajar diferentes planos, tanto superficial como en profundidad. Hay que tener en cuenta que, a menor frecuencia, mayor penetración y por el contrario, a mayor frecuencia menor es la penetración. El cabezal corporal permite utilizar radiofrecuencia, vacum, PEMF y lipólisis láser en diferentes combinaciones, lo que posibilita realizar diversas variaciones en diferentes tratamientos de acuerdo con las necesidades particulares de cada persona.

La radiofrecuencia genera una estimulación del tejido conectivo con todo el proceso de colagenogénesis para mejorar aspectos de la piel, arrugas y líneas de expresión, y trabajar en tejidos adiposos profundos.

La terapia de campo electromagnético pulsado (PEMF) es una tecnología de campos electromagnéticos de baja emisión que dirige una serie de impulsos magnéticos induciendo una pequeña señal eléctrica lo que contribuye al mejoramiento circulatorio ayudando a la estimulación y reactivación celular. Posee dos tipos de ondas: cuadrada y triangular. La onda cuadrada trabaja a niveles más superficiales que tiene que ver con cuestiones referidas a la piel, en cambio la onda triangular trabaja a niveles más profundo dando excelentes resultados en tratamientos referidos a celulitis y adiposidad.

El tratamiento con vacum genera un vacío permanente con una modulación controlada de la succión por medio de una presión negativa constante que rompe fibrosis generando una reactivación celular y de los capilares.

El cabezal corporal cuenta, además, con 9 diodos láser de baja emisión de 650 nm que colaboran con la eliminación del tejido adiposo.

Zonas de Trabajo

- Rostro
- Cuello
- Abdomen
- Brazos
- Glúteos
- Muslos
- Zonas trocaterianas
- Flancos
- Zonas sub escapulares

Contraindicaciones

- Marcapasos
- Embarazo
- Lactancia
- Epilepsia
- Cáncer
- Trayectos Varicosos
- Cualquier alteración de la piel



Escanea el Código QR con tu dispositivo móvil que te llevará directamente a nuestra página web donde encontrarás toda la información referida al equipo y sus tratamientos

Medidas de Seguridad

Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del usuario, puede ayudar a obtener muchos años de uso y operación segura.

- **Leer las instrucciones.** Todas las instrucciones de operación y seguridad deben ser leídas antes de operar este equipo
- **Accesorios:** Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo
- **Limpieza:** Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o líquidos
- **Equipo Clase I:** Los equipos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y la ficha provista
- Para su seguridad la instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no ser así, realice la adecuación con personal especializado
- La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe cumplir con las normativas vigentes locales

Su equipo ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de incendio.

Generalidades y Consejos

- El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, cocinas u otros productos que produzcan calor
- Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento y coloración amarillenta sobre el gabinete
- Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes
- El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la ficha del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo
- NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas
- Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil
- Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los cables de conexión, gabinete y accesorios en general
- Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor rojo del equipo para su correcto apagado

Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha de alimentación

Especificaciones Generales

Especificaciones Técnicas

Regulación de vacío	7 niveles de frecuencia: de 1 Hz a 4 Hz
Frecuencia de trabajo de Radiofrecuencia	1.3 MHz – 1.0 MHz – 0.8 MHz – 0.6 MHz
Potencia de radiofrecuencia	De 0 a 100% (2 en 2)
Nivel de vacío de succión	Medio - Alto
Frecuencia de vacío	De 1 a 4 Hz
Cantidad de diodos	9 láseres
Longitud de onda láser	650 nm
Potencia de diodo láser	50 mW (450 mW total)
Tiempo de sesión	1 a 60 m
Dimensiones	50 x 95 x 34 cm
Peso	38 kg
Pantalla	LCD 10, 1 táctil

Especificaciones Eléctricas

Alimentación	220 VCA 50/60 Hz. (120 V 50/60Hz)
Consumo máximo	357,94 W
Consumo aproximado en reposo	31,02 W
Consumo mínimo	33,44 W
Fusible	M 10 A, 250 V
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0

Condiciones Ambientales De Almacenamiento Y Transporte

Temperatura	Entre 5 °C y 50 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Condiciones Ambientales De Uso

Temperatura	Entre 5 °C y 25 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Incluye:

- 4 cabezales:
 - Un cabezal corporal con Vacuum, Radiofrecuencia, PEMF y Láser
 - Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar
 - Un cabezal facial de emisión radial bipolar
 - Un cabezal facial de emisión puntual multipolar
- 1 soporte de cabezales, tornillos y herramienta de fijación
- Cable de alimentación
- 1 bolso mediano
- Manual de usuario


Partes aplicables:

- 4 cabezales:
 - Un cabezal corporal con Vacuum, Radiofrecuencia, PEMF y Láser
 - Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar
 - Un cabezal facial de emisión radial bipolar
 - Un cabezal facial de emisión puntual multipolar
- 1 soporte de cabezales, tornillos y herramienta de fijación

El periodo útil del equipo es de 5 años

Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes nacionales en vigor en el país de instalación

Partes del equipo

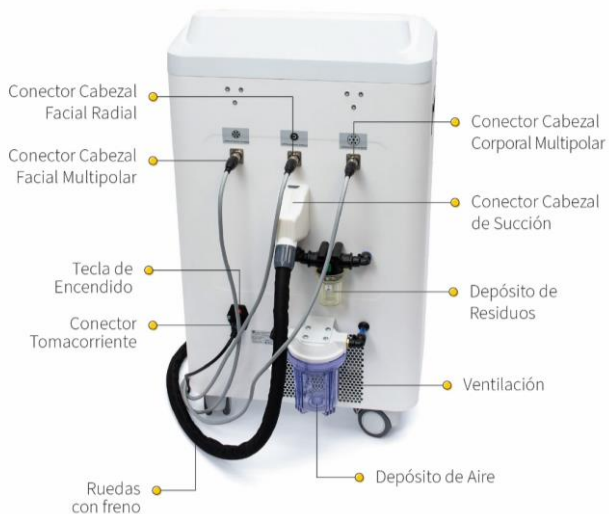

Recomendaciones de uso

Modo de uso

Se sugiere la utilización de lociones preferentemente oleosas o emulsiones no acuosas. No es recomendable el uso de geles o cremas de gran consistencia porque obstruyen el circuito de vacío ya que tienden a endurecerse y a acumularse, lo que puede obstruir las mangueras y dificultar su flujo generando riesgo de fallas y daños en las piezas internas.

Es importante asegurarse que el depósito de residuos este limpio y seco después de cada sesión.

Aplicación

Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual

- La persona en tratamiento debe estar siempre a la vista del operador
- Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales
- No mojar la zona tratada con agua caliente
- Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños

Temporalmente puede aparecer:

- Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar desde unos minutos a horas
- Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual que el enrojecimiento, un corto período de tiempo



¡ATENCIÓN! Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

Tiempo de tratamiento

Tanto la cantidad como el tiempo de cada sesión, dependerá de lo indicado por el profesional calificado.

Todo consejo aquí presentado es de carácter general, en cualquier caso, será el profesional calificado quien deberá adecuar el uso del equipo a cada persona y a su propia evolución.

Funcionamiento del equipo

Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al comienzo de este manual

- Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente con red de 220 V y al equipo
- Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto no permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de este

Los equipos de la Clase I poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **No las elimine** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. No obstruir las ventilaciones.

Configuración de un programa

Presentación



Al encender el equipo, demorará aproximadamente 30 segundos para que aparezca la pantalla de presentación. Luego, hará una señal audible en concepto de que ya se puede comenzar a usar. Presione la pantalla para continuar.

Pantalla de inicio



En la pantalla de inicio, se pueden ver todas las opciones disponibles para acceder.

Inicio Rápido



conjunto, simplemente puede desmarcarla según sus necesidades específicas.

La **radiofrecuencia** puede operar con las 4 frecuencias simultáneamente, o puede seleccionar las frecuencias deseadas marcándolas. Una vez iniciado el tratamiento, la potencia se puede ajustar utilizando las flechas y siempre comenzará en 0. El rango de potencia va desde el 0% hasta el 100%. Se programará según la evaluación individual realizada por el profesional, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona.

El Inicio Rápido es una modalidad de programación que permite modificar manualmente cualquier parámetro. Además, el equipo puede configurarse para trabajar con las cuatro tecnologías disponibles: radiofrecuencia, vacío, PEMF y lipólisis láser. En caso de no utilizar alguna de ellas en

El **vacío** corresponde a la opción de Vacuum. Puede seleccionar entre los niveles de succión de potencia **Medio** o **Alto**. Además,

puede ajustar la frecuencia en un rango de 1 Hz a 4 Hz con incrementos de 0.5 Hz.

Para el **PEMF**, se puede elegir entre el tipo de onda triangular o cuadrada (ambas tienen la misma frecuencia que va de 10 Hz a 50 Hz). La frecuencia se puede ajustar utilizando las flechas.

Lipólisis Láser puede seleccionarse pulsando la casilla para encenderla o desmarcarla para desactivarla.

Aquí, no puede seleccionar el tipo de tratamiento sino programarlo según la evaluación que hizo el profesional.

El **tiempo de sesión** se refiere al tiempo que se programa la sesión.

Muestra el tiempo restante de la sesión expresada en minutos y segundos y; solo el cabezal corporal de succión medirá la temperatura para un control.

Además, podrá seleccionar el cabezal con el que vaya a trabajar. En el caso que cambie de


cabezal durante el tiempo de sesión, se desprogramará todo lo que haya programado con el cabezal anterior.

Una vez configurados todos los parámetros del equipo, puede iniciar la sesión pulsando el botón **Iniciar**. Si lo desea, puede pausar la sesión en cualquier momento.

Una vez que el equipo esté en funcionamiento, no se puede modificar el tiempo de la sesión. Para ajustarlo, es necesario finalizar la sesión y volver a configurar todos los parámetros nuevamente.



Si alguno de los cabezales seleccionados no está conectado, se mostrará un mensaje en pantalla para informarlo.

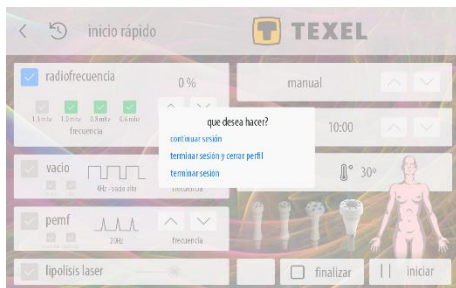


Si el equipo está en funcionamiento y necesita finalizar la sesión, aparecerá un mensaje que ofrece las opciones de: **Continuar Sesión, Terminar y Cerrar Perfil, y Terminar Sesión.**



Ejemplo: Si durante el tratamiento se está utilizando el cabezal radial facial y se decide seleccionar, también, el cabezal corporal de succión con vacío, el cabezal radial facial se resaltará y el cabezal corporal de vacío parpadeará para indicar que también está en funcionamiento. Esto aplica a cualquiera de los cabezales faciales y al corporal multipolar.




Si el cabezal corporal de succión no está conectado, en la pantalla, junto al icono del termómetro, se mostrarán las siglas **ND** que indican **No Disponible**. De lo contrario, se visualizarán los grados del cabezal sobre la piel de la persona.

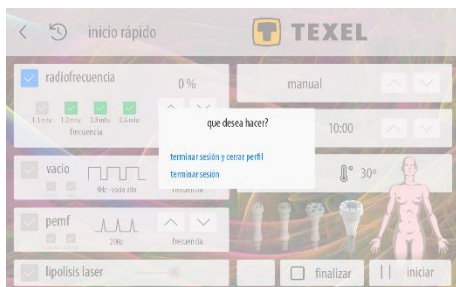


Al finalizar la sesión, aparecerá el cartel que refiere a: ¿Qué desea hacer? indicando opciones como: **Terminar Sesión y Cerrar Perfil y Terminar Sesión.**

Seleccionar Tratamiento

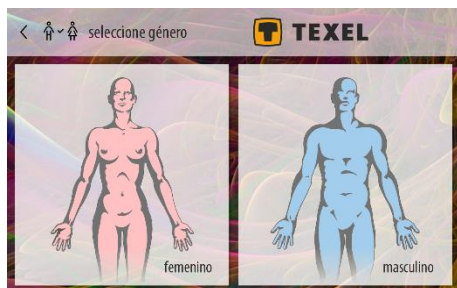

En la sección de **Seleccionar Tratamiento**, deberá seleccionar el género, ya sea femenino o masculino.

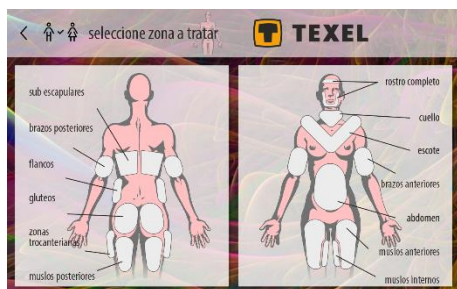

Posteriormente, se mostrará una pantalla que indica las áreas del cuerpo que puede configurar. Deberá seleccionar una zona a tratar para poder elegir el tipo de tratamiento.



Luego, selecciona el tratamiento que desee realizar. La cantidad de tipos de tratamientos va a ir variando de acuerdo con la zona de trabajo que elija.



Una vez configurados todos los parámetros del equipo, con el botón **INICIAR** comenzará la sesión.

Los parámetros son sugeridos, pero pueden ser modificados según las necesidades específicas del usuario. Incluso, pueden ser cambiados durante la sesión.

Para modificar el tiempo de sesión, es necesario primero finalizar la sesión en curso para luego reprogramarla.

Seleccionar Perfil



Puede establecer un perfil único para cada persona incluyendo todos los datos personales necesarios. Además, desde esta pantalla, se podrá acceder al historial guardado con la información de trabajos realizados.

Al seleccionar el perfil, puedes eliminarlo, pero quedará registrado en la sección de **Actividad**.

Crear Perfil



Al seleccionar **Crear Perfil**, puede completar con los datos personales como pueden ser: Nombre y Apellido, DNI (campo obligatorio), y como opcional dirección y correo electrónico. Una vez completo estos datos, deberá seleccionar el botón **Guardar Perfil**.

Buscar Perfil



En la parte izquierda de la pantalla, se visualiza un listado de perfiles creados. Aquí, podrá buscar los perfiles guardados incluyendo todos los datos personales

necesarios. Además, puede seleccionar el botón **Actividad del usuario** para ver su historial. Desde esta pantalla, también se puede acceder al historial de trabajos realizados.

Si selecciona el botón **Seleccionar Perfil**, podrá programar el género, la zona a tratar y el tipo de tratamiento. Posteriormente, aparecerán los parámetros establecidos y solo deberá presionar **Iniciar**

Actividad del Usuario



Actividad


TEXEL

pagina 1 de 1

USUARIO	GÉNERO	ZONA	TRATAMIENTO	POTENCIA	FRECUENCIA	ONDA	MOD.	VACÍO	TIPO	DURACIÓN	FECHA
casual	masculino	masculino	masculino	25%	1.5Hz	1.5Hz	casual	20 x 1.5Hz	desactivado	15min	21/05/21
casual	masculino	masculino	masculino	25%	1.5Hz	1.5Hz	casual	20 x 1.5Hz	desactivado	15min	20/05/21
casual	masculino	masculino	masculino	25%	1.5Hz	1.5Hz	casual	20 x 1.5Hz	desactivado	15min	19/05/21

Al presionar el botón **Actividad del usuario**, se podrá observar en detalle todo el historial del usuario seleccionado.

Actividad

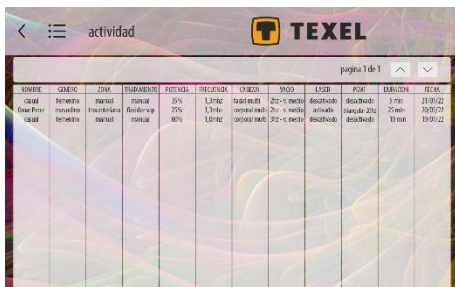

Actividad

TEXEL

pagina 1 de 1

USUARIO	GÉNERO	ZONA	TRATAMIENTO	POTENCIA	FRECUENCIA	ONDA	MOD.	VACÍO	TIPO	DURACIÓN	FECHA
casual	masculino	masculino	masculino	25%	1.5Hz	1.5Hz	casual	20 x 1.5Hz	desactivado	15min	21/05/21
casual	masculino	masculino	masculino	25%	1.5Hz	1.5Hz	casual	20 x 1.5Hz	desactivado	15min	20/05/21
casual	masculino	masculino	masculino	25%	1.5Hz	1.5Hz	casual	20 x 1.5Hz	desactivado	15min	19/05/21

tratamiento, potencia, frecuencia, tipo de cabezal, uso de vacío, láser, PEMF duración y fecha. Es esencial tener en cuenta que las fechas de actividad sin conexión a WiFi no se actualizarán ni se guardaran, sino que se basará en la última conexión a internet. Si el historial abarca más de una página, podrá desplazarse utilizando las flechas correspondientes

En la sección de actividad, tendrá acceso al historial completo detallando información relevante como nombre, género, zona, **Configuración**

Si no se ha creado un perfil previamente, el equipo guardará el contacto como Casual.



En la pantalla de configuración, se pueden ver todas las opciones disponibles para acceder.

Configuración WIFI



Para acceder a una red WiFi, simplemente actualice la lista de redes disponibles. Si desea conectarse a una red específica, selecciónela y presione el botón **Acceder**. Luego, ingrese la contraseña correspondiente.

Actualización Software



En la sección de actualización de software, aparecerá un mensaje indicando si es necesario actualizar la versión del software. Si no es necesario actualizar, presione *la flecha que indica Atrás*. Si se requiere una actualización, espere unos minutos hasta que el equipo se actualice.

Limpiar historial



La limpieza del historial, sólo se hará en fábrica.

Apagado Seguro



El apagado seguro se utiliza para suspender el equipo. Deberá esperar unos minutos y luego, apagarlo de la tecla roja que se encuentra en la parte posterior del equipo

Programas

ZONA DE TRABAJO	NOMBRE DEL TRATAMIENTO	RADIOFRECUENCIA				VACUUM		PEMF		LLT	TIEMPO	APLICADOR				
		0,6 Mhz	0,9 Mhz	1,0 Mhz	1,3 Mhz	Nivel 1: Medio 2: Alto	Frecuencia	Onda	Frecuencia			ON/OFF	min	Corporal Puntal (60mm)	Facial Bucal (120mm)	Corporal Puntal (60mm)
Abdomen (12 min)																
Brazo Anterior (10 min)	Flacidez Corporal Superficial					1	3,5 Hz	~	20 Hz		16					
Brazo Posterior (10 min)	Flacidez Corporal Profunda					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
Flancos	Estrias					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
Muslo Posterior	Celulitis Flácida					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
Muslos Anteriores	Celulitis					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
Muslos Internos	Adiposidad y Celulitis					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
Sub Escapular (12 min)	Adiposidad Leve					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
Zonas Trocantenarias	Adiposidad Moderada					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Zona Orbicular										16					
	Flacidez Facial Profunda										16					
Rostro Completo	Flacidez Facial Superficial										16					
	Flacidez Corporal Superficial					2	2,5 Hz	~	20 Hz		16					
	Flacidez Corporal Profunda					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Estrias					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Celulitis Flácida					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Celulitis					1	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Adiposidad y Celulitis					2	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Adiposidad Leve					2	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Adiposidad Moderada					2	3 Hz	~	20 Hz		16					
	Escote					1	3,5 Hz	~	20 Hz		8					
Cuello	Flacidez Corporal Superficial					1	3,5 Hz	~	20 Hz							
	Flacidez Corporal Profunda					1	3,5 Hz	~	20 Hz							

Limpieza y desinfección

La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un paño húmedo con detergente neutro

- El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere se puede efectuar un control periódico en fábrica
- No se puede esterilizar en autoclaves de vapor

Limpieza de Depósito de Residuos y Depósito de Aire

El Multitec dentro de su gabinete contiene un sistema de circulación con mangueras que trabaja drenando los productos utilizados en el cabezal corporal de succión. Esos restos se almacenan en el depósito de residuos que se encuentra en la parte posterior del gabinete (ver Imagen 1). Es importante verificar que no pase los límites estipulados para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y prolongar su vida útil. También, el equipo contiene un depósito de aire que funciona como cámara de vacío que protege el motor (ver imagen 2). Deberá permanecer siempre limpio. En el caso que ingrese algún residuo, por favor comunicarse con el servicio técnico autorizado.



Imagen 1



Imagen 2

Siga las instrucciones del fabricante para asegurar un uso correcto y prolongar la vida útil del equipo.

1. Asegurarse que el depósito de residuos (vaso pequeño) este vacío
2. Encender el equipo activando solamente la sesión en vacío
3. Vuelque agua tibia dentro del cabezal para drenar restos de producto revisando continuamente que el depósito de residuos no supere el límite indicado
4. Desenroscar el depósito de residuos y tirar restos de producto

Servicio técnico

Si se ignoran estas advertencias, se podría poner en riesgo de forma irreversible la seguridad general del sistema, lo cual puede resultar peligroso para el operador, las que reciben el tratamiento y el entorno.

- El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL SRL o un servicio autorizado expresamente para tal fin
- **NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.** No intente dar servicio a este equipo usted mismo, abriendo o retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos
- Desenchufe el equipo del tomacorriente y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
 - Si el cable de alimentación o enchufe están dañados
 - Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua
 - Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de operación indicadas en el manual
 - Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado
 - Cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento

Garantía

- El equipo fabricado por TEXEL SRL, tiene cobertura de garantía por el término de **2 (dos) años**. La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL SRL, a un distribuidor o representante autorizado
- Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica
- Durante el periodo de la garantía, es importante guardar el embalaje original del equipo. Cualquier traslado debe realizarse utilizando el embalaje original, junto con su correspondiente protección interna, para garantizar su integridad durante el transporte
- La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas. De esta manera, los gastos del transporte corren por cuenta del fabricante
- La validez de la garantía quedará anulada si el equipo ha sido objeto de modificaciones, golpes, uso inadecuado, esfuerzos inapropiados, reparaciones realizadas por personal no autorizado o si ha sido conectado a una instalación eléctrica defectuosa. Esto incluye variaciones en la tensión de la red que excedan los límites de tolerancia, así como voltajes incorrectos, independientemente de su origen. Por consiguiente, todos los gastos relacionados con el envío del equipo al servicio técnico oficial de TEXEL SRL correrán a cargo del comprador.

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, revendedor/distribuidor o servicio técnico autorizado

Advertencias

Disposición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera segura y ecológica



- A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego
- Haga controlar el equipo 1 vez al año
- Incompatibilidades con otros equipos: la operación del equipo en cercanías a un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento, ocasionando daños en el equipo



- Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor
- Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales electromagnéticos u otras interferencias entre equipos

Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento técnico de fábrica.

Simbología

	Encendido		Frágil
	Apagado		Posición de transporte y almacenamiento
	Tierra de protección: conexión del equipo al conductor de protección a tierra		Proteger de la lluvia
	Equipo de Clase I con protección contra descargas eléctricas y parte aplicada Tipo B (IEC 60601-1)		Fusible
	Este símbolo recuerda que es obligatorio leer cuidadosamente toda la documentación y los manuales suministrados con el producto médico antes de realizar cualquier operación		Fabricante
	Advertencia, consulte los documentos adjuntos		Número [n] máximo de cajas que pueden apilarse de manera segura.
	Respete las normas de aplicación de su municipalidad para el desecho del equipo médico		Condiciones de temperatura de transporte y almacenamiento
	Corriente alterna		Condiciones de humedad de transporte y almacenamiento
	Fecha de fabricación		Condiciones de presión de transporte y almacenamiento
	Advertencia: Tensión peligrosa. Riesgo de choque eléctrico		No empujar
	Número de Serie		



www.texel.com.ar



 Pichincha 54 Bis,
2000 Rosario, Argentina.

 info@texel.com.ar

 +54 9 341 3022075

 +54 0341 4397575