



Manual de Usuario



CR



TEXEL
EQUIPOS ELECTROMEDICOS

Tabla de contenido

Finalidad de Uso	3
Zonas de Trabajo	4
Contraindicaciones	4
Medidas de Seguridad	5
Generalidades y Consejos	6
Especificaciones Generales.....	6
Partes del equipo.....	8
Recomendaciones de uso	9
Modo de uso.....	9
Aplicación.....	10
Tiempo de tratamiento	10
Funcionamiento del equipo.....	10
Configuración de un programa.....	11
Presentación	11
Pantalla de inicio	11
Inicio rápido	11
Cabezal corporal desconectado	12
Equipo pausado.....	12
Fin de sesión	13
Seleccionar tratamiento	13
Seleccionar perfil.....	15
Crear perfil	15
Información adicional	17
Actividad	17
Configuración	17
Programas.....	18
Limpieza y desinfección	19
Recarga de Líquido.....	19
Servicio técnico	20

Garantía.....	22
Advertencias	22
Simbología	25

Finalidad de Uso

Criotec es un equipo de frío radiofrecuencia multipolar multifrecuencial de última generación con la más avanzada tecnología. Tiene como finalidad el rejuvenecimiento cutáneo tanto facial como corporal ya que genera una estimulación del colágeno y elastina que logra reafirmar la piel combatiendo la flacidez cutánea. También es excelente en tratamientos de reducción de celulitis y adiposidad.

Criotec cuenta con 4 cabezales:

- Un cabezal corporal con frío de emisión radial multipolar
- Un cabezal facial de emisión radial bipolar
- Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar
- Un cabezal facial de emisión puntual multipolar

A diferencia de otras radiofrecuencias, Criotec permite variar la frecuencia para trabajar diferentes planos, tanto superficial como en profundidad. La radiofrecuencia genera una estimulación del fibroblasto con todo el proceso de colagenogénesis. A nivel profundo genera un aumento y mejoramiento circulatorio y metabólico con la finalidad de producir lipólisis por temperatura. Criotec permite activar el proceso de renovación natural del colágeno y estimular la síntesis de nuevas fibras de colágeno y elastina para mejorar aspectos de la piel, como arrugas y líneas de expresión, y trabajar en tejidos adiposos profundos para reducción de flacidez, adiposidad y celulitis de cualquier parte del cuerpo. La aplicación simultánea de frío y radiofrecuencia permite potenciar los resultados ya que el efecto del frío produce una inhibición de las terminaciones nerviosas sensitivas de la piel en la superficie, logrando trabajar con mayores temperaturas a nivel profundo evitando las sensaciones molestas. Al mismo tiempo, este shock térmico, tiene un efecto estimulante del fibroblasto, superior a las radiofrecuencias convencionales, lo que produce:

- mayor estimulación de colágeno
- mayor estimulación de elastina
- mayor producción de ácido hialurónico y otros componentes dérmicos producidos por el fibroblasto

Los resultados son visibles desde la primera aplicación

Zonas de Trabajo

- Rostro
- Cuello
- Abdomen
- Brazos
- Glúteos
- Muslos
- Zonas trocaterianas
- Flancos
- Zonas sub escapulares

Contraindicaciones

- Marcapasos
- Embarazo
- Epilepsia
- Cáncer
- Trayectos Varicosos
- Cualquier alteración de la piel



Escanea el Código QR con tu dispositivo móvil que te llevará directamente a nuestra página web donde encontrarás toda la información referida al equipo y sus tratamientos.

Medidas de Seguridad

Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del usuario, puede ayudar a obtener muchos años de uso y operación segura.

- **Leer las instrucciones.** Todas las instrucciones de operación y seguridad deben ser leídas antes de operar este equipo
- **Accesorios:** Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo
- **Limpieza:** Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o líquidos
- **Equipo Clase I:** Los equipos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y la ficha provista

- Para su seguridad la instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no ser así, realice la adecuación con personal especializado
- La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe cumplir con las normativas vigentes locales

Su equipo ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de incendio.

Generalidades y Consejos

- El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, cocinas u otros productos que produzcan calor
- Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento y coloración amarillenta sobre el gabinete
- Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes
- El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la ficha del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo
- NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas
- Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil
- Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los cables de conexión, gabinete y accesorios en general
- Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor rojo del equipo para su correcto apagado

Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha de alimentación

Especificaciones Generales

Especificaciones Técnicas

Tipo de radiofrecuencia	Tripolar - Bipolar
Frecuencia	1.3 MHz – 1.0 MHz 0.8 MHz – 0.6 MHz
Tipo de Frecuencia	Fija - Modulada
Sistema de Frío	Si
Potencia	150 W
Sensor y control de temperatura	SI
Diámetro del cabezal corporal de frío	80 mm

Superficie del cabezal corporal de frío	50 cm ²
Historial de actividad	SI
Tipos de tratamientos	8
Combinaciones	Más de 78
Dimensiones	50x95x34 cm
Peso	38 kg
Pantalla	10,1" Táctil

Especificaciones Eléctricas

Alimentación	220 VCA @ 50/60 Hz
Consumo máximo	301,62 W
Consumo aproximado en reposo	51,04 W
Consumo mínimo	57,86 W
Fusible	3 A – 250 V – Acción rápida
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0

Condiciones Ambientales De Almacenamiento Y Transporte

Temperatura	Entre 5 °C y 50 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Condiciones Ambientales De Uso

Temperatura	Entre 5 °C y 25 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Incluye:

- Un cabezal corporal con frío de emisión radial multipolar
- Un cabezal facial de emisión radial bipolar
- Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar
- Un cabezal facial de emisión puntual multipolar
- 1 soporte de cabezales, tornillos y herramienta de fijación
- Herramientas para el llenado y purga
- 1 L de líquido refrigerante
- 1 Bolso mediano
- Cable de alimentación
- Manual de usuario


Partes aplicables:

- Un cabezal corporal con frío de emisión radial multipolar
- Un cabezal facial de emisión radial bipolar
- Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar
- Un cabezal facial de emisión puntual multipolar
- 1 soporte de cabezales, tornillos y herramienta de fijación
- Herramientas para el llenado y purga
- 1 L de líquido refrigerante

El periodo útil del equipo es de 5 años

Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes nacionales en vigor en el país de instalación

Partes del equipo

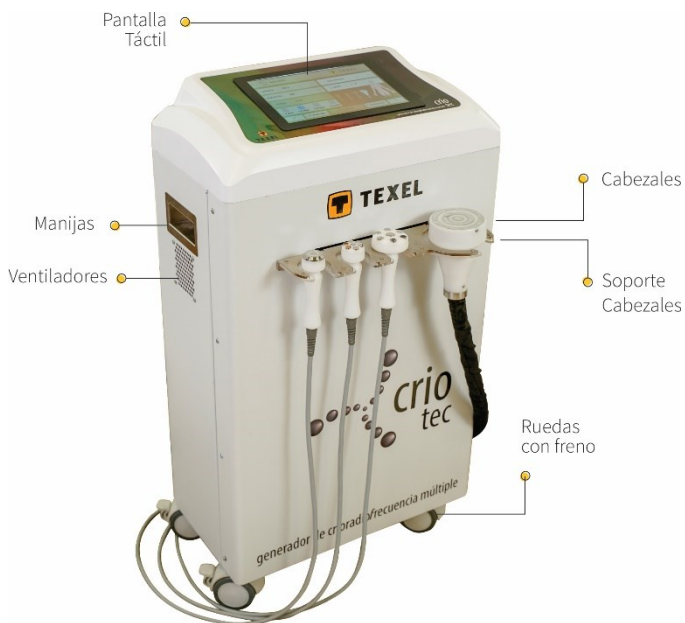

Recomendaciones de uso

Modo de uso

- Siempre asegúrese de tener un buen contacto entre el cabezal y la zona a tratar, y utilice siempre gel neutro como base conductor

Aplicación

Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual

- La persona en tratamiento debe estar siempre a la vista del operador
- Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales
- No mojar la zona tratada con agua caliente
- Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños

Temporalmente puede aparecer:

- Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar desde unos minutos a horas
- Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual que el enrojecimiento, un corto período de tiempo



¡ATENCIÓN! Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

Tiempo de tratamiento

Tanto la cantidad como el tiempo de cada sesión, dependerá de lo indicado por el profesional calificado.

Todo consejo aquí presentado es de carácter general, en cualquier caso, será el profesional calificado quien deberá adecuar el uso del equipo a cada persona y a su propia evolución.

Funcionamiento del equipo

Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al comienzo de este manual

- Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente con red de 220 V y al equipo
- Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto no permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de este

Los equipos de la Clase I poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **No las elimine** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. No obstruir las ventilaciones

Configuración de un programa

Presentación



Al encender el equipo, demorará aproximadamente 30 segundos para que aparezca la pantalla de presentación. Luego, hará una señal audible en concepto de que ya se puede comenzar a usar. Presione la pantalla para continuar.

Pantalla de inicio



En la pantalla de inicio, se pueden ver todas las opciones disponibles para acceder.

Inicio rápido

El Inicio Rápido es una modalidad de programación que permite modificar manualmente cualquier parámetro.

La **radiofrecuencia** puede operar con las 4 frecuencias simultáneamente, o puede seleccionar las frecuencias deseadas marcándolas. Una vez iniciado el tratamiento, la potencia se puede ajustar utilizando las flechas y siempre comenzará en 0. El rango de potencia va desde el 0% hasta el 100%. Se programará según la evaluación individual realizada por el profesional, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona.

En cuanto al nivel de frío tiene 3 niveles: Activado, nivel medio y desactivado.

Aquí, no puede seleccionar el tipo de tratamiento sino programarlo según la evaluación que hizo el profesional.



Equipo pausado

El **tiempo de sesión** se refiere al tiempo que se programa la sesión. Además, muestra el tiempo restante de la sesión expresada en minutos y segundos y; solo el cabezal de frío medirá la temperatura para un control.

También, podrá seleccionar el cabezal con el que vaya a trabajar. En el caso que cambie de cabezal durante el tiempo de sesión, se desprogramará todo lo que haya programado con el cabezal anterior.

Una vez configurados todos los parámetros del equipo, puede iniciar la sesión pulsando el botón **Iniciar**. Si lo desea, puede pausar la sesión en cualquier momento.

Una vez que el equipo esté en funcionamiento, no se puede modificar el tiempo de la sesión. Para ajustarlo, es necesario finalizar la sesión y volver a configurar todos los parámetros nuevamente.

Cabezal corporal desconectado

En esta pantalla significa que el cabezal corporal de frío no está correctamente conectado al equipo. En este caso, se recomienda verificar que el cabezal esté correctamente insertado en su conector y que no haya suciedad, humedad o daños visibles en los pines o en el conector.




Si el equipo está en funcionamiento y necesita finalizar la sesión, aparecerá un mensaje que ofrece las opciones de: **Continuar Sesión o Cancelar Sesión**.

Fin de sesión




Al finalizar la sesión, aparecerá el cartel que refiere a: ¿Qué desea hacer? indicando opciones como: **Terminar Sesión y Cerrar Perfil y Terminar Sesión**

Seleccionar tratamiento

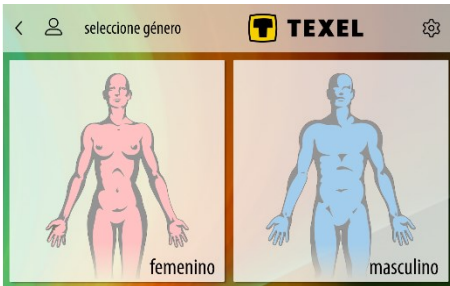

En la sección de **Seleccionar Tratamiento**, deberá seleccionar el género, ya sea femenino o masculino.

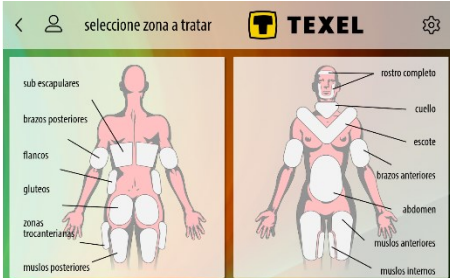

Posteriormente, se mostrará una pantalla que indica las áreas del cuerpo que puede configurar. Deberá seleccionar una zona a tratar para poder elegir el tipo de tratamiento.



En el caso que la zona a tratar elegida sea correcta, debe presionar Continuar; de lo contrario podrá cancelar y volver a seleccionar otra zona de trabajo.



Luego, selecciona el tratamiento que desee realizar. La cantidad de tipos de tratamientos va a ir variando de acuerdo con la zona de trabajo que elija.



Una vez configurados todos los parámetros del equipo, con el botón **INICIAR** comenzará la sesión.

Los parámetros son sugeridos, pero pueden ser modificados según las necesidades específicas del usuario. Incluso, pueden ser cambiados durante la sesión.


Para modificar el tiempo de sesión, es necesario primero finalizar la sesión en curso para luego reprogramarla.

Finalizar sesión



Al finalizar la sesión, aparecerá el cartel que refiere a: ¿Qué desea hacer? indicando opciones como: **Continuar y Cancelar**

Seleccionar perfil

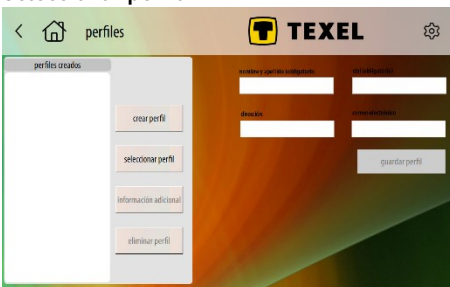

Puede establecer un perfil único para cada paciente, incluyendo todos los datos personales necesarios. Además, desde esta pantalla, se podrá acceder al historial guardado con la información de trabajos realizados.

Puede eliminar el perfil si lo desea.

Crear perfil



Al seleccionar **Crear Perfil**, puede completar con los datos personales como pueden ser: Nombre y Apellido, DNI (campo obligatorio), y como opcional dirección y correo electrónico. Una vez completo estos datos, deberá seleccionar el botón **Guardar Perfil**

Seleccionar perfil



Puede establecer un perfil único para cada persona incluyendo todos los datos personales necesarios. Además, desde esta pantalla, se podrá acceder al historial guardado con la información de trabajos realizados.

Al seleccionar el perfil, puedes eliminarlo, pero quedará registrado en la sección de **Actividad**

Buscar perfil



En la parte izquierda de la pantalla, se visualiza un listado de perfiles creados. Aquí, podrá buscar los perfiles guardados incluyendo todos los datos personales necesarios. Además, puede seleccionar el botón **Actividad del usuario** para ver su historial. Desde esta pantalla, también se puede acceder al historial de trabajos realizados.


Si selecciona el botón **Seleccionar Perfil**, podrá programar el género, la zona a tratar y el tipo de tratamiento. Posteriormente, aparecerán los parámetros establecidos y solo deberá presionar **Iniciar**

Información adicional



Toda la información de ese paciente

Actividad

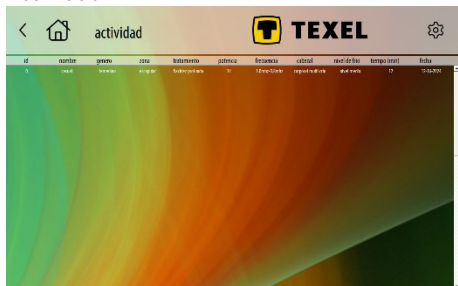

En la sección de actividad, tendrá acceso al historial completo de las personas, detallando información relevante como nombre, género, zona, tratamiento, potencia, frecuencia, tipo de cabezal, uso de vacío, láser, PEMF duración y fecha. Es esencial tener en cuenta que las fechas de actividad sin conexión a WiFi no se actualizarán ni se guardaran, sino que se basará en la última conexión a internet. Si el historial abarca más de una página, podrá desplazarse utilizando las flechas correspondientes

Si no se ha creado un perfil previamente, el equipo guardará el contacto como Casual.

Configuración



Para acceder a una red WiFi, simplemente Ingrese el nombre de la red con su respectiva contraseña. Luego, presione el botón **Conectar**.

Programas

ZONA DE TRABAJO	NOMBRE DEL TRATAMIENTO	RADIOFRECUENCIA				NIVEL DE FRIO			TIEMPO min	APLICADOR			
		0,6 Mhz	0,8 Mhz	1,0 Mhz	1,3 Mhz	Bajo	Medio	Alto		Corporal Puntal (8cm)	Facial Barral (20cm)	Corporal Puntal (5cm)	Facial Puntal (20cm)
Abdomen (12 min)									12				
Brazo Anterior (10 min)	Flacidez Corporal Superficial								12				
Brazo Posterior (10 min)	Flacidez Corporal Profunda								12				
Flancos	Estrías								12				
Muslo Posterior	Celulitis Flácida								12				
Muslos Anteriores	Celulitis								12				
Muslos Internos	Adiposidad y Celulitis								12				
Sub Escapular (12 min)	Adiposidad								12				
Zonas Trocantenarias									12				
									16				
	Zona Orbicular								16				
	Flacidez Facial Profunda								16				
Rostró Completo	Flacidez Facial Superficial								16				
									16				
									16				
	Flacidez Corporal Superficial								16				
	Flacidez Corporal Profunda								16				
	Estrías								16				
	Celulitis Flácida								16				
Gluteos	Celulitis								16				
	Adiposidad y Celulitis								16				
	Adiposidad Leve								16				
	Adiposidad Moderada								16				
									16				
Escote	Flacidez Corporal Superficial								10				
Cuello	Flacidez Corporal Profunda								10				

Limpeza y desinfección

- La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un paño seco
- La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 °C
- El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere, se puede efectuar un control periódico en fábrica.
- No se puede esterilizar en autoclaves de vapor



Recarga de Líquido

Una vez iniciada la sesión y con el nivel de frío activado (en cualquiera de sus niveles), si se detecta un error de flujo, el equipo:

- a) Detiene automáticamente la sesión
- b) Aparece un cartel de advertencia con tres opciones disponibles para el usuario:



- 1) **Continuar sin frío:** al presionar este botón, el cartel desaparece. El usuario puede iniciar una nueva sesión, pero sin la posibilidad de activar el frío. En caso de que intente volver a activar el frío durante la sesión, el cartel volverá a aparecer con las mismas opciones.



2) **Recargar:** para recargar el líquido, siga los siguientes pasos:

- Coloque una manguera con embudo en la ENTRADA DE AGUA y otra en la SALIDA DE PURGA, como se indica en la figura correspondiente
- Presione el botón RECARGAR
- Se iniciará una cuenta regresiva de 60 segundos. Durante ese tiempo, el usuario deberá verter el líquido necesario por el embudo hasta que comience a salir por la SALIDA DE PURGA

Aclaración: no es necesario realizar la carga

durante estos 60 segundos. Si este proceso lleva más tiempo, volverá a comenzar el contador, luego presionar el botón RECARGA HECHA.

- 3) **Recarga hecha:** este botón sirve para confirmar que la recarga fue realizada correctamente. Una vez presionado le botón, el cartel se cierra y el usuario puede iniciar sesión normalmente.

Importante: Si el usuario presiona el botón “Recarga hecha” sin haber completado la recarga, el cartel se cerrará igual, pero el equipo volverá a reactivar el error de flujo. En ese caso, la sesión se detendrá nuevamente y aparecerá otra vez el cartel.

Servicio técnico

Si se ignoran estas advertencias, se podría poner en riesgo de forma irreversible la seguridad general del sistema, lo cual puede resultar peligroso para el operador, las que reciben el tratamiento y el entorno.

- El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL SRL o un servicio autorizado expresamente para tal fin
- **NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.** No intente dar servicio a este equipo usted mismo, abriendo o retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos
- Desenchufe el equipo del tomacorriente y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
 - Si el cable de alimentación o enchufe están dañados
 - Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua
 - Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de operación indicadas en el manual
 - Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado

- Cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento



En caso de que el equipo presente la siguiente falla, por favor comuníquese de inmediato con el servicio técnico autorizado.

- Es importante no intentar reparar el equipo por su cuenta para evitar daños mayores.

Garantía

- El equipo fabricado por TEXEL SRL, tiene cobertura de garantía por el término de **2 (dos) años**. La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL SRL, a un distribuidor o representante autorizado
- Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica
- Durante el periodo de la garantía, es importante guardar el embalaje original del equipo. Cualquier traslado debe realizarse utilizando el embalaje original, junto con su correspondiente protección interna, para garantizar su integridad durante el transporte
- La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas. De esta manera, los gastos del transporte corren por cuenta del fabricante
- La validez de la garantía quedará anulada si el equipo ha sido objeto de modificaciones, golpes, uso inadecuado, esfuerzos inapropiados, reparaciones realizadas por personal no autorizado o si ha sido conectado a una instalación eléctrica defectuosa. Esto incluye variaciones en la tensión de la red que excedan los límites de tolerancia, así como voltajes incorrectos, independientemente de su origen. Por consiguiente, todos los gastos relacionados con el envío del equipo al servicio técnico oficial de TEXEL SRL correrán a cargo del comprador.

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, revendedor/distribuidor o servicio técnico autorizado

Advertencias

Disposición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera segura y ecológica



- A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego
- Haga controlar el equipo 1 vez al año
- Incompatibilidades con otros equipos: la operación del equipo en cercanías a un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada inestabilidad



en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento, ocasionando daños en el equipo

- Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor
- Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales electromagnéticos u otras interferencias entre equipos

Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento técnico de fábrica.

Simbología

	Encendido		Frágil
	Apagado		Posición de transporte y almacenamiento
	Tierra de protección: conexión del equipo al conductor de protección a tierra		Proteger de la lluvia
	Equipo de Clase I con protección contra descargas eléctricas y parte aplicada Tipo B (IEC 60601-1)		Fusible
	Este símbolo recuerda que es obligatorio leer cuidadosamente toda la documentación y los manuales suministrados con el producto médico antes de realizar cualquier operación		Fabricante
	Advertencia, consulte los documentos adjuntos		Número [n] máximo de cajas que pueden apilarse de manera segura.
	Respete las normas de aplicación de su municipalidad para el desecho del equipo médico		Condiciones de temperatura de transporte y almacenamiento
	Corriente alterna		Condiciones de humedad de transporte y almacenamiento
	Fecha de fabricación		Condiciones de presión de transporte y almacenamiento
	Advertencia: Tensión peligrosa. Riesgo de choque eléctrico		No empujar
	Número de Serie		





www.texel.com.ar



 Pichincha 54 Bis,
2000 Rosario, Argentina.

 info@texel.com.ar

 +54 9 341 3022075

 +54 0341 4397575