

ONDAS RUSAS

Manual de Usuario



OR



TEXEL
EQUIPOS ELECTROMEDICOS

Tabla de contenido

Finalidad de Uso	3
Tipos de Ondas	3
ONDAS RUSAS	3
Zonas de Trabajo	3
Contraindicaciones	3
Medidas de Seguridad	5
Generalidades y Consejos	5
Especificaciones Generales	6
Partes del equipo	9
Recomendaciones de uso	10
Aplicación	10
Tiempo de tratamiento	10
Funcionamiento del equipo	11
Configuración de un programa	12
Pantalla de inicio	12
Selección de un programa manual	12
Frecuencia de ráfaga	12
Modo de salida de Onda	12
Configuración Rampa de Subida – Contracción – Rampa de bajada – Relajación	13
Repeticiones y Descanso	13
Tiempo de sesión	14
Inicio de sesión	14
A tener en cuenta	14
Equipo trabajando	14
Fin de sesión	15
Selección de programa preestablecido	15
Inicio de sesión	15
Equipo trabajando	15
Fin de sesión	16

Limpieza y desinfección	18
Limpieza de electrodos.....	18
Servicio técnico.....	18
Garantía	19
Advertencias	19
Simbología.....	21

Finalidad de Uso


El equipo Ondas Rusas está diseñado para ofrecer a los profesionales una amplia gama de estímulos eléctricos, permitiendo abordar diferentes objetivos terapéuticos y estéticos según el criterio de cada especialista. Este equipo genera ondas rusas que producen diferentes tipos de contracciones musculares, mejorando la tonificación, la hipertrofia, y otros beneficios según el tratamiento aplicado.

Tipos de Ondas

ONDAS RUSAS

La característica principal de esta onda es que tiene una frecuencia de 2.500 Hz. Para lograr un mejor efecto estas ondas no se aplican en forma continua, sino que se aplican en forma de ráfagas, es decir, que están presentes o no a una frecuencia de 10 a 100 Hz.

Otra característica distintiva de estas ondas es que no se aplica a una intensidad constante. Comienzan desde cero y aumentan progresivamente hasta alcanzar el nivel máximo seleccionado, lo que conforma la rampa de subida. Posteriormente, la intensidad se mantiene constante en ráfagas, lo que define la zona de contracción. Luego, disminuye suavemente durante algunos segundos en la rampa de bajada, hasta que la intensidad vuelve a cero, marcando la zona de relajación. Los tiempos de las fases de rampa, contracción y relajación se ajustan según las necesidades de cada persona y tratamiento. Las Ondas Rusas pueden generar contracciones musculares más intensas que las voluntarias.

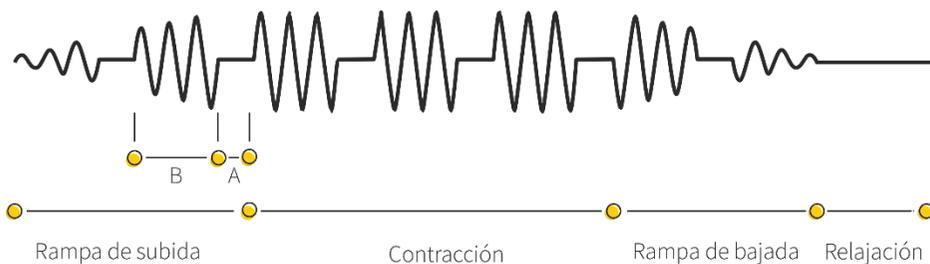

Zonas de Trabajo

- Brazos
- Abdomen
- Espalda
- Glúteos
- Piernas

Contraindicaciones

- Embarazo
- Cáncer
- Epilepsia
- Trayectos varicosos
- Marcapasos



Escanea el Código QR con tu dispositivo móvil que te llevará directamente a nuestra página web donde encontrarás toda la información referida al equipo y sus tratamientos.

Medidas de Seguridad

Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del usuario, puede ayudar a obtener muchos años de uso y operación segura.

- **Leer las instrucciones.** Todas las instrucciones de operación y seguridad deben ser leídas antes de operar este equipo
- **Accesorios:** Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo
- **Limpieza:** Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o líquidos
- **Equipo Clase I:** Los equipos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y la ficha provista
- Para su seguridad la instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no ser así, realice la adecuación con personal especializado
- La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe cumplir con las normativas vigentes locales

Su equipo ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de incendio.

Generalidades y Consejos

- El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, cocinas u otros productos que produzcan calor
- Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento y coloración amarillenta sobre el gabinete
- Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes
- El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la ficha del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo
- NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas
- Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil
- Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los cables de conexión, gabinete y accesorios en general
- Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor rojo del equipo para su correcto apagado

Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha de alimentación

Especificaciones Generales

Especificaciones Técnicas

Cantidad de canales	4
Cantidad de programas	12 (2 manuales - 10 preestablecidos)
Tipo de Onda	Rusas
Forma de Onda	<ul style="list-style-type: none">• Tipo Rusa (Senoidal de 2.500 Hz con ráfagas)
Modo de trabajo	<ul style="list-style-type: none">• Todos• Extensión - flexión• Secuencial
Frecuencia de ráfagas	De 10 Hz a 100 Hz (de 10 en 10) <ul style="list-style-type: none">• Tiempo de Rampa de subida: de 0 a 15 s• Tiempo de Contracción: de 0 a 15 s• Tiempo de Rampa de bajada: de 0 a 15 s• Tiempo de Relajación: de 0 a 60 s
Configuración envolvente	<ul style="list-style-type: none">• Todos los canales simultáneos• Secuencial• Extensión - Flexión
Modos salida de Onda	<ul style="list-style-type: none">• Activado:<ul style="list-style-type: none">• Cantidad de repeticiones: 1 a 99• Descanso entre grupo de repeticiones: 1 a 9 m• Desactivado
Modo Repeticiones	
Tiempo de sesión	De 1 a 60 minutos
Dimensiones	45x18x28 cm
Peso	4 kg
Pantalla	LCD de 20 x 4 con Back-Light

Especificaciones Eléctricas

Alimentación	220 VCA @ 60 Hz
Consumo máximo	27,94 W
Consumo aproximado en reposo	15,18 W

Consumo aproximado trabajando	17,38 W
Fusible	1 A –Acción rápida
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0

Condiciones Ambientales De Almacenamiento Y Transporte

Temperatura	Entre 5 °C y 50 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Condiciones Ambientales De Uso

Temperatura	Entre 5 °C y 25 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Incluye:

- 4 bandas elásticas con abrojo de 110 cm
- 2 bandas elásticas con abrojo de 70 cm
- 8 Electrodo grandes de 100 mm
- 4 Electrodo chicos de 50 mm
- 4 Cables dobles con Plug a fichas bananas de 4 mm
- 1 bolso Mediano
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

Partes aplicables

- 4 bandas elásticas con abrojo de 110 cm
- 2 bandas elásticas con abrojo de 70 cm
- 8 electrodo grandes de 100 mm
- 4 electrodo chicos de 50 mm
- 4 Cables dobles con Plug a fichas bananas de 4 mm

El periodo útil del equipo es de 5 años

Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes nacionales en vigor en el país de instalación

Partes del equipo



Recomendaciones de uso

Modo de uso

Para asegurar una correcta transmisión de la corriente durante la electroestimulación con el equipo Ondas Rusas, es fundamental utilizar un medio conductor entre los electrodos de goma y la piel. Se pueden emplear dos métodos principales: aplicar un paño humedecido con agua o colocar un gel neutro directamente sobre los electrodos.

Aplicación

Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual

- La persona en tratamiento debe estar siempre a la vista del operador
- Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales
- No mojar la zona tratada con agua caliente
- Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños

Temporalmente puede aparecer:

- Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar desde unos minutos a horas
- Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual que el enrojecimiento, un corto período de tiempo



¡ATENCIÓN! Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

Tiempo de tratamiento

Tanto la cantidad como el tiempo de cada sesión, dependerá de lo indicado por el profesional calificado.

Todo consejo aquí presentado es de carácter general, en cualquier caso, será el profesional calificado quien deberá adecuar el uso del equipo a cada persona y a su propia evolución.

Funcionamiento del equipo

Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al comienzo de este manual

- Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente con red de 220 V y al equipo
- Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto no permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de este

Los equipos de la Clase I poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **No las elimine** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. No obstruir las ventilaciones.


Configuración de un programa

Pantalla de inicio




Al encender el equipo, se observa la pantalla de presentación. Para comenzar a trabajar, simplemente presione el botón **Inicio**.

Selección de un programa manual

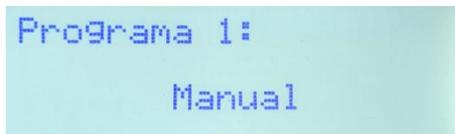


El equipo cuenta con dos programas manuales que permiten modificar todos los parámetros establecidos. Además,

Frecuencia de ráfaga

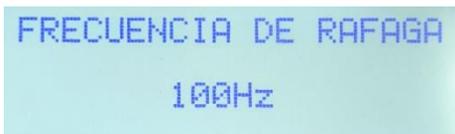

La frecuencia de ráfaga puede programarse entre 10 Hz y 100 Hz, con

Modo de salida de Onda

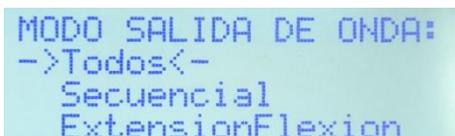

El equipo cuenta con tres modos de funcionamiento: Todos, Secuencial y Extensión-Flexión.

Modo TODOS: Todos los canales se activan simultáneamente, y la regulación es la misma para cada uno, excepto en la amplitud, que es ajustable de forma individual.

Modo SECUENCIAL: Los canales se activan uno por vez. El cambio de canal se

estos programas guardan la última configuración utilizada. Sin embargo, si se desea realizar modificaciones, es posible hacerlo en cualquier momento.

incrementos de 10 en 10, y se puede aumentar o disminuir utilizando los botones de las flechas.

produce al finalizar cada ciclo de Rampa de subida, Contracción y Rampa de bajada.

Modo EXTENSIÓN-FLEXIÓN: La salida se realiza de a dos canales a la vez. Primero, se activan los canales 1 y 3, mientras que los canales 2 y 4 permanecen inactivos. Luego, se invierte: los canales 2 y 4 se activan, y los canales 1 y 3 se ponen en cero. Los canales 1 y 3 inician desde el principio de la rampa de subida, seguido por la contracción y la rampa de bajada, momento en el que los canales 2 y 4 comienzan su ciclo. Este diseño asegura transiciones suaves para cada persona.

Configuración Rampa de Subida – Contracción – Rampa de bajada – Relajación

RAMPA DE SUBIDA:

04 SEGUNDOS

Es el tiempo que el equipo utiliza para aumentar gradualmente la intensidad de

CONTRACCION:

04 SEGUNDOS

En esta fase, la corriente alcanza su máxima intensidad, provocando la

RAMPA DE BAJADA:

05 SEGUNDOS

Tras la contracción, el equipo disminuye gradualmente la intensidad de la

RELAJACION:

05 SEGUNDOS

Es el intervalo de tiempo entre cada ciclo de estimulación, durante el cual el músculo se relaja por completo antes de

Repeticiones y Descanso

REPETICIONES:

03

DESCANSO:

01 MINUTOS

la corriente desde cero hasta el nivel deseado. Esta fase inicial, suave, permite al usuario adaptarse a la estimulación, reduciendo el riesgo de molestias. El tiempo programable varía entre 0 y 15 segundos.

contracción muscular. Es un período clave, ya que estimula el músculo de forma controlada, ajustándose al tratamiento específico. El tiempo programable es de 0 a 15 segundos.

corriente hasta llegar a cero. Esta fase de descenso suave facilita la relajación controlada del músculo, evitando espasmos o incomodidades. El tiempo programable es de 0 a 15 segundos.


que inicie el siguiente ciclo de rampa de subida, contracción y rampa de bajada. El tiempo programable va de 0 a 60 segundos.

Las repeticiones determinan cuántas veces se repetirá el ciclo de estimulación en una sesión. Pueden configurarse como desactivado o ajustarse entre 1 y 99 repeticiones.

El tiempo de descanso entre repeticiones es fundamental para permitir una adecuada recuperación muscular. Este intervalo puede configurarse entre 0 y 9 minutos.

Si las repeticiones están configuradas en 0, el tiempo de descanso no se mostrará ni estará disponible para ajuste, ya que, al no haber repeticiones, no existen ciclos de estimulación que requieran un período de descanso entre ellos.

Tiempo de sesión

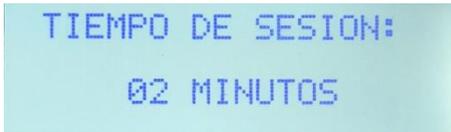

En esta pantalla, puede seleccionar la duración total de la sesión. Use los botones de flecha para ajustar el tiempo

Inicio de sesión



A tener en cuenta



Equipo trabajando



El código OR significa Ondas Rusas, seguido del número del programa en uso. La imagen siguiente muestra la fase actual del proceso, ya sea rampa de subida, contracción, rampa de bajada o relajación. Además, se visualiza el tiempo restante de la sesión, que irá disminuyendo durante el proceso.

También se muestra el porcentaje de potencia aplicado en cada canal, ajustable mediante los potenciómetros

según sus necesidades, aumentando o disminuyéndolo. Una vez seleccionado, confirme la configuración presionando el botón **Inicio**. Si desea modificar la configuración después de haberla confirmado, presione el botón **Parada** para volver a la pantalla anterior y realizar los ajustes necesarios.

Una vez configurados todos los parámetros, debe presionar el botón **Inicio** para comenzar la sesión.

En caso de que los potenciómetros no estén en 0, la pantalla mostrará un mensaje pidiendo que se ajusten todos a esa posición.

correspondientes. Las luces ubicadas debajo de cada potenciómetro indican las fases de rampa de subida, contracción, rampa de bajada y relajación, información que se visualiza tanto en el visor como en las luces.

- Durante la rampa de subida y bajada, la luz parpadea.
- Durante la contracción, la luz permanece encendida.
- Durante la relajación, la luz se apaga.


Finalmente, los mA que se reflejan en el visor son una referencia de la corriente que se está emitiendo por cada canal.

Fin de sesión



Al concluir la sesión, se emitirá una señal sonora para indicar que el tiempo ha finalizado. Si lo desea, puede detener la sesión en cualquier momento presionando el botón **Parada**.

Selección de programa preestablecido

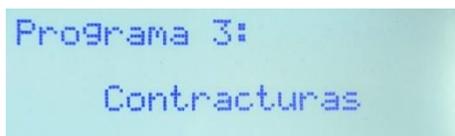

Los programas preestablecidos de Ondas Rusas son:

- 3 - Contracturas
- 4 - Relajación muscular
- 5 - Resistencia aeróbica

Inicio de sesión



Equipo trabajando



El código OR significa Ondas Rusas, seguido del número del programa en uso. La imagen siguiente muestra la fase actual del proceso, ya sea rampa de subida, contracción, rampa de bajada o relajación. Además, se visualiza el tiempo restante de la sesión, que irá disminuyendo durante el proceso.

Una vez finalizada la sesión, si presiona el botón **Inicio**, el equipo mantendrá los últimos ajustes utilizados. Si prefiere programarlo de manera diferente, deberá presionar el botón **Parada** para reiniciar todos los parámetros.

Al presionar nuevamente el botón **Parada**, el sistema regresará a la pantalla de Selección de Programas.

- 6 - Consumo de grasas
- 7 - Concientización muscular
- 8 - Fuerza - Resistencia
- 9 - Volumen - Forma
- 10 - Volumen - Hipertono
- 11 - Fuerza - Velocidad
- 12 - Fuerza - Explosiva

Una vez configurados todos los parámetros, debe presionar el botón **Inicio** para comenzar la sesión.

También se muestra el porcentaje de potencia aplicado en cada canal, ajustable mediante los potenciómetros correspondientes. Las luces ubicadas debajo de cada potenciómetro indican las fases de rampa de subida, contracción, rampa de bajada y relajación, información que se visualiza tanto en el visor como en las luces.

- Durante la rampa de subida y bajada, la luz parpadea.

- Durante la contracción, la luz permanece encendida.
- Durante la relajación, la luz se apaga.

Fin de sesión



Al finalizar la sesión, se emitirá una señal sonora para indicar que el tiempo ha terminado. Si lo necesita, puede detener la sesión en cualquier momento presionando el botón Parada.

Finalmente, los mA que se reflejan en el visor son una referencia de la corriente que se está emitiendo por cada canal.

Después de la finalización, al presionar el botón Inicio, el equipo mantendrá los últimos ajustes utilizados. Si desea programar los parámetros de manera diferente, deberá presionar Parada para reiniciar la configuración.

Si vuelve a presionar Parada, el equipo regresará a la pantalla de Selección de Programas.

Guía de programas preestablecidos

N° de PROGRAMA	PROGRAMA	RAMPADA SUBIDA	CONTRACCION	RAMPADA BAJADA	RELAXACION	FRECUENCIA DE RAFAÇA	TIEMPO	MODDO DE TRABAJO
3	Analgésia - Dolor Agudo	0 seg	0 seg	0 seg	0 seg	2000Hz	15 min	TODOS
4	Analgésia - Dolor Crónico	0 seg	0 seg	0 seg	0 seg	50Hz	15 min	TODOS
5	Bombeo Circulatorio (paquetes venosos profundos)	2 seg	4 seg	2 seg	8 seg	50Hz	30 min	TODOS
6	Fatiga Neuromuscular (lactacidemia)	2 seg	4 seg	2 seg	8 seg	50Hz	30 min	TODOS
7	Volumen Muscular (hipertrofia)	1 seg	3 seg	1 seg	10 seg	70Hz	20min	TODOS
8	Volumen y Definición Muscular (hipertrofia e hiperplasia)	1 seg	1 seg	1 seg	10 seg	90Hz	10min	TODOS
9	Circulatorio (linfoático)	5 seg	2 seg	5 seg	0 seg	15Hz	30 min	SECUENCIAL
10	Consumo De Grasas - Aeróbico	5 seg	10 seg	5 seg	2 seg	30Hz	35 min	TODOS
11	Consumo De Grasas - Superaeróbico	1 seg	1 seg	1 seg	0 seg	40Hz	30 min	TODOS
12	Tonificación Muscular Moderada (incremento de fuerza)	1 seg	8 seg	1 seg	9 seg	50Hz	20 min	TODOS

Limpieza y desinfección

- La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un paño seco
- La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 °C
- El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere, se puede efectuar un control periódico en fábrica.
- No se puede esterilizar en autoclaves de vapor

Limpieza de electrodos

- Para garantizar el correcto funcionamiento del electrodo de goma y prolongar su vida útil, es recomendable limpiar con un paño humedecido en agua después de cada uso

Servicio técnico

Si se ignoran estas advertencias, se podría poner en riesgo de forma irreversible la seguridad general del sistema, lo cual puede resultar peligroso para el operador, las que reciben el tratamiento y el entorno.

- El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL SRL o un servicio autorizado expresamente para tal fin
- **NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.** No intente dar servicio a este equipo usted mismo, abriendo o retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos
- Desenchufe el equipo del tomacorriente y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
 - Si el cable de alimentación o enchufe están dañados
 - Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua
 - Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de operación indicadas en el manual
 - Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado
 - Cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento

Garantía

El equipo fabricado por TEXEL SRL, tiene cobertura de garantía por el término de **2 años**

- La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL SRL, a un distribuidor o representante autorizado
- Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica
- Durante el periodo de la garantía, es importante guardar el embalaje original del equipo. Cualquier traslado debe realizarse utilizando el embalaje original, junto con su correspondiente protección interna, para garantizar su integridad durante el transporte
- La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas. De esta manera, los gastos del transporte corren por cuenta del fabricante
- La validez de la garantía quedará anulada si el equipo ha sido objeto de modificaciones, golpes, uso inadecuado, esfuerzos inapropiados, reparaciones realizadas por personal no autorizado o si ha sido conectado a una instalación eléctrica defectuosa. Esto incluye variaciones en la tensión de la red que excedan los límites de tolerancia, así como voltajes incorrectos, independientemente de su origen. Por consiguiente, todos los gastos relacionados con el envío del equipo al servicio técnico oficial de TEXEL SRL correrán a cargo del comprador

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, distribuidor o servicio técnico autorizado.

Advertencias

Disponición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera segura y ecológica



- A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego
- Haga controlar el equipo 1 vez al año
- Incompatibilidades con otros equipos: la operación del equipo en cercanías a un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento, ocasionando daños en el equipo
- Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor
- Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales electromagnéticos u otras interferencias entre equipos



Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento técnico de fábrica.

Simbología

	Encendido		Frágil
○	Apagado		Posición de transporte y almacenamiento
	Tierra de protección: conexión del equipo al conductor de protección a tierra		Proteger de la lluvia
	Equipo de Clase I con protección contra descargas eléctricas y parte aplicada Tipo B (IEC 60601-1)		Fusible
	Este símbolo recuerda que es obligatorio leer cuidadosamente toda la documentación y los manuales suministrados con el producto médico antes de realizar cualquier operación		Fabricante
	Advertencia, consulte los documentos adjuntos		Número [n] máximo de cajas que pueden apilarse de manera segura.
	Respete las normas de aplicación de su municipalidad para el desecho del equipo médico		Condiciones de temperatura de transporte y almacenamiento
	Corriente alterna		Condiciones de humedad de transporte y almacenamiento
	Fecha de fabricación		Condiciones de presión de transporte y almacenamiento
	Advertencia: Tensión peligrosa. Riesgo de choque eléctrico		
	Número de Serie		



www.texel.com.ar



 Pichincha 54 Bis,
2000 Rosario, Argentina.

 info@texel.com.ar

 +54 9 341 3022075

 +54 0341 4397575